



DTX Studio™ Implant 3.6

Gebrauchsanweisung



Hersteller:

Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17
Göteborg, Schweden
Telefon: +46 31 81 88 00
Fax: +46 31 16 31 52
www.nobelbiocare.com



Rx Only

Lizenzausschluss für Kanada: Beachten Sie, dass unter Umständen nicht alle Produkte nach kanadischem Recht zugelassen sind.

Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden.

Basis-UDI-Name	Basis-UDI-DI
Diagnose- und Behandlungssoftware	733274700000016275

GMT 76777 DE 10. Oktober 2021 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen in diesem Dokument vorkommenden Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken der Nobel Biocare Gruppe. iPad® ist eine eingetragene Marke der Apple® Inc., Adobe® ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern. Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft® Corp. Die Produktabbildungen in diesem Dokument sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu.

Inhalt

Inhalt	3
Einführung	8
Haftungsausschluss	8
Produktbeschreibung	8
Verwendungszweck	8
Verwendungszweck/Indikationen	9
Vorgesehene Anwender und Zielgruppe von Patienten	9
Erforderliche Kompatibilität mit anderen Geräten	9
Produkte mit Messfunktion	9
Kontraindikationen	9
Vorsichtsmaßnahmen	9
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	9
Warnungen	10
Warnungen	10
Cybersicherheit	10
Kompatibilität	11
Interoperabilität	11
Vorgesehene Lebensdauer	11
Leistungsanforderungen und -grenzen	11
Klinischer Nutzen und unerwünschte Ereignisse	11
Ausstattung und Schulung	11
Hinweis bezüglich schwerwiegender Ereignisse	11
Zusatzinformationen	11
Start	12
Das Behandlungskonzept	12
Öffnen von DTX Studio™ Implant	12
Grundlegende Aktionen mit Patientendateien	12
Erstellen einer neuen Patientendatei	12
Eine vorhandene Patientendatei öffnen	12
Einen Behandlungsplan öffnen	12
Einen Behandlungsplan speichern	12
Einen Behandlungsplan kopieren	12
Einen Behandlungsplan umbenennen oder löschen	12
Behandlungsplan schließen	12
Eine Patientendatei schließen	13
Patientendateien archivieren	13

Anwenderidentifizierung	14
Anmelden	14
Zwei-Faktor-Authentifizierung	14
Anwenderwechsel	14
Account-Details verwalten	14
Praxislizenzversion	15
Installieren der Praxislizenzversion	15
Kontoverwaltung	15
Hinzufügen von Anwendern	15
Die Software im Überblick	16
Arbeitsbereich	17
Was ist ein Arbeitsbereich?	17
Symbolleiste	17
Interaktion in den Ansichten	18
Bearbeiten von Objekten	19
Ein- und Ausblenden von Objekten	19
Bearbeiten von CT-Schichten	20
Blättern durch CT-Bilder	20
Level/Window	20
Level/Window in 2-D	20
Level/Window in 3-D	20
Patientenmodell	21
Erstellen eines 3-D-Patientenmodells	21
Bearbeiten der Form der Querschnittskurve	21
Bearbeiten vorhandener Kontrollpunkte	21
Verwenden von Zahnkontrollpunkten	21
Einstellen der Größe der Querschnittsansicht	22
Darstellung des Patientenmodells	22
Was ist eine Übertragungsfunktion?	22
Bereinigen der Darstellung des Patientenmodells	22
Patientenmaske	22
Löschen von Knochenartefakten	23
Maske deaktivieren	23
Patientenmaske zurücksetzen	23
Größten Teil erhalten	23
Prothetische Informationen	24
Diagnostische Zahnaufstellung	24
Dentalscan	24
Scan des Gipsmodells	24
Intraoraler Scan oder anderer Desktop-Scan	24

SmartFusion™	25
Hinzufügen des Dentalscans zum Patientenmodell	25
Initialisierung von SmartFusion™	26
Initialisierungsverfahren	26
So starten Sie den Initialisierungsassistenten	26
So definieren Sie korrespondierende Punkte mit dem Assistenten	27
Gesichtsscan	29
Hinzufügen eines Gesichtsscans zum Patientenmodell	29
Trimmen eines Gesichtsscans	29
SmartSetup™	29
Berechnen eines SmartSetup™	29
SmartSetup™ Einstellungen	29
Bearbeiten eines SmartSetup™	30
Modell der Röntgenschablone	31
Tiefdruck-Oberfläche	31
Diagnose	32
Nerven	32
Zähne	32
Entfernen von Zähnen aus dem Modell	32
Gleichzeitiges Entfernen aller Zähne	32
Einen Einzelzahn extrahieren	33
Messungen	33
Implantate planen	34
Arbeiten mit Implantaten, die nicht von Nobel Biocare sind	34
Hinzufügen eines Implantats zu einem Behandlungsplan	34
Bedeutung der gelben Zone	35
Zahnposition	35
Zahnübersicht	35
Bearbeiten eines Implantats	35
Ändern der Implantatausrichtung	35
Verschieben eines Implantats	35
Paralleles Ausrichten von Implantaten	36
Parallele Implantate platzieren	36
Parallele Implantate platzieren	36
Abutments	36
Einstellen der Art des Eingriffs	36
Unterschiedliche Eingriffstypen	37
Versatz der Pilotheile	37
Rotation der Pilotheile	37
Knochenschnittebene	37

Verankerungsstifte	38
Verankerungsstifte zum Behandlungsplan	38
Korrekte Neigung und Tiefe von Verankerungsstiften	38
Verankerungsstifte und Röntgenschablone (Arbeitsablauf bei zahnlosem Kiefer)	39
Verankerungsstifte und Dentscan (Arbeitsablauf bei teilbezahntem Kiefer)	40
Prüfen eines Behandlungsplans	41
Arbeiten mit der Snap-Funktion	41
Springen zu anderem Implantat oder Verankerungsstift	41
Zurückkehren in den Kurvenmodus	41
Fertigstellen	42
Erstellen einer OP-Schablone	42
Überprüfen der OP-Schablone	42
Bearbeiten der virtuellen OP-Schablone	43
Bestätigen eines Behandlungsplans	43
Bestellungen	44
Arbeiten mit Verbindungen	44
Hinzufügen einer Verbindung	44
Annehmen einer Verbindung	44
Arbeiten mit Bestellungen	44
Produktbestellungen	44
Erstellen von Produktbestellungen	44
Senden einer Produktbestellung	45
Modellscan-Bestellungen	45
Erstellen von Modellscan-Bestellungen	45
TempShell Bestellungen	45
Der TempShell Arbeitsablauf	45
Erstellen einer LabDesign-Anforderung	46
Erstellen einer TempShell-Bestellung	46
Hinzufügen eines LabDesign zum Behandlungsplan	46
Hinzufügen einer TempShell zum Behandlungsplan	46
Serviceanforderungen	47
Der typische Arbeitsablauf für Serviceanforderungen über DTX Studio™ Go	47
Reagieren auf eine Serviceanforderung	47
Der „lokale“ Arbeitsablauf für Serviceanforderungen	47
Arbeiten mit dem DTX Studio™ Implant Assistenten	48
DTX Studio™ Implant Warnsystem	49
DTX Studio™ Implant Warnungen	50
Schablonenwarnungen	50

Klinische Warnungen	51
Allgemeine Warnungen	51
Implantatwarnungen	52
Konfigurierbare Warnungen	52
Technische Einschränkungen	53
Mindestabstand zwischen den Führungshülsen	53
Vorgeschriebener Mindestabstand von Implantaten/Führungshülsen und Verankerungsstiften	53
Kollision zwischen Implantaten, Verankerungsstiften oder Implantaten und Verankerungsstiften	53
Verhältnis zwischen Führungshülse und Röntgenschablone und/oder Dentalscan	54
Röntgenschablone	54
Scan des Gipsmodells	54
Verhältnis zwischen Führungshülse und Knochen	55
Guided Abutments	55
Die Röntgenschablone wurde ohne kalibrierten Isowert erstellt.	55
Diskutieren des Behandlungsplans	56
Berichte	56
Erstellen eines Berichts	56
Drucken eines Berichts	56
Viewer-Dateien	57
Erstellen einer Viewer-Datei	57
Öffnen von Viewer-Dateien mit DTX Studio™ Implant	57
Öffnen von Viewer-Dateien über den Download-Link	57
Communicator-Präsentationen	58
Erstellen einer Communicator-Präsentation	58
Exportieren eines Behandlungsplans zum Einsehen oder für den Eingriff	59
Exportieren nach DTX Studio™ Clinic	59
Öffnen des Exports	59
X-Guide™ OP-Plan	59
Erstellen eines X-Guide™ OP-Plans	59
Exportieren eines X-Guide™ OP-Plans	59
OsseoCare™ Pro OP-Plan	60
Erstellen eines OsseoCare™ Pro OP-Plans	60
Scannerkalibrierung	61
Erstellen eines neuen Kalibrierungssets	61
Symbolglossar	62
Index	63

Einführung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Produkt ist Bestandteil eines umfassenden Behandlungskonzepts und darf ausschließlich in Kombination mit den zugehörigen Originalprodukten gemäß den Anweisungen und Empfehlungen von Nobel Biocare verwendet werden. Durch die nicht empfohlene Verwendung von Produkten von Fremdanbietern in Kombination mit Produkten von Nobel Biocare erlischt die Garantie und andere ausdrückliche oder konkludente Verpflichtungen von Nobel Biocare werden nichtig. Der Anwender von Produkten von Nobel Biocare muss feststellen, ob das Produkt für einen bestimmten Patienten unter den gegebenen Bedingungen geeignet ist. Nobel Biocare übernimmt keine Haftung, weder ausdrücklich noch konkludent, für direkte oder mittelbare Schäden, Strafe einschließenden Schadensersatz oder sonstige Schäden, die durch oder in Verbindung mit Fehlern bei der fachlichen Beurteilung oder Praxis im Rahmen der Verwendung von Nobel Biocare Produkten auftreten. Der Anwender ist außerdem verpflichtet, sich regelmäßig über die neuesten Weiterentwicklungen in Bezug auf dieses Nobel Biocare Produkt und seine Anwendung zu informieren. Im Zweifelsfall ist Nobel Biocare zu kontaktieren. Da die Nutzung des Produkts der Kontrolle des Anwenders obliegt, übernimmt dieser die Verantwortung. Nobel Biocare übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch die Verwendung des Produkts. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass einige Produkte, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, unter Umständen nicht in allen Märkten lizenziert oder für den Verkauf zugelassen sind.

Lesen Sie vor der Verwendung von DTX Studio™ Implant sorgfältig die Gebrauchsanweisung, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Dokument aufgeführten Informationen Sie in das Thema einführen sollen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DTX Studio™ Implant ist eine Software für den klinischen Einsatz zur Unterstützung bildbasierter Diagnoseverfahren und zur Behandlungsplanung dentaler, kranio-maxillofazialer und dazugehöriger Behandlungen.

Zur Unterstützung der Diagnoseverfahren und der Behandlungsplanung dentaler, kranio-maxillofazialer und dazugehöriger Behandlungen bietet DTX Studio™ Implant eine Darstellungstechnik für (DVT)CT-Bilder des Patienten für den Diagnostik- und Behandlungsplanungsprozess an. Zusätzlich können 2-D-Bilddaten wie zum Beispiel fotografische und Röntgen-Aufnahmen oder Oberflächenscans der intraoralen Situation visualisiert werden, sodass alle diagnostischen Bilddaten zusammengeführt werden können. Prothetikinformationen können hinzugefügt und visualisiert werden, um die prothetische Implantatplanung zu unterstützen. Der OP-Plan, einschließlich der Implantatpositionen und Prothetikinformationen, kann exportiert werden, um die Dentalversorgungen in DTX Studio™ Lab zu entwerfen.

DTX Studio™ Implant unterstützt das NobelGuide® Behandlungskonzept zur oralen Versorgung mit Zahnimplantaten. Es ist Teil des umfassenden Systems für die schablonengeführte Chirurgie („NobelGuide® Konzept“) für die Zahnimplantatbehandlung von zahnlosen und teilbezahnten Kiefern, einschließlich der Versorgung von Einzelzähnen.

DTX Studio™ Implant Anwender haben die Möglichkeit, an regelmäßigen Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen, um die Planungssoftware noch besser zu beherrschen und das Beste aus ihr herauszuholen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Schulungskursen, die auf der Nobel Biocare Website unter www.nobelbiocare.com verfügbar sind.

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck der Software ist die Unterstützung der Diagnoseverfahren und der Behandlungsplanung dentaler und kranio-maxillofazialer Verfahren.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN

DTX Studio™ Implant ist eine Softwareschnittstelle für die Übertragung und Darstellung von 2-D- und 3-D-Bildinformationen, die von Geräten wie Computertomographen zur Unterstützung des Diagnoseverfahrens, der Behandlungsplanung und der Nachuntersuchung in dentalen und kranio-maxillofazialen Bereichen stammen. DTX Studio™ Implant kann verwendet werden, um die schablonengeführte Implantatchirurgie zu unterstützen und um prothetische Lösungen zu designen und zu prüfen. Die Ergebnisse können für die Fertigung exportiert werden.

VORGESEHENE ANWENDER UND ZIELGRUPPE VON PATIENTEN

DTX Studio™ Implant wird von einem interdisziplinären Behandlungsteam zur Unterstützung bei der Behandlung von Patienten verwendet, die sich dentalen, kranio-maxillofazialen oder dazugehörigen Behandlungen unterziehen.

Vorgesehen für Patienten, die sich einer Zahnbehandlung unterziehen müssen.

ERFORDERLICHE KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN GERÄTEN

- DTX Studio™ Implant Viewer Software
- NobelClinician Communicator iPad App
- OsseoCare™ Pro iPad App
- DTX Studio™ Lab
- DTX Studio™ Implant muss mit den am häufigsten verwendeten Betriebssystemen Windows und Mac kompatibel sein, einschließlich der neuesten Versionen.
- X-Guide™ – 3-D-Navigationssystem (X-Nav Technologies, LLC)
- DTX Studio™ Clinic
- NobelGuide® Konzept und OP-Schablonen
- Nobel Biocare Implantate und Standardabutments
- Zum Importieren von Oberflächendaten in DTX Studio™ Implant: Oberflächenscan erfasst mit NobelProcera® 2G Scanner, Kavo LS 3 Scanner; verschlüsseltes Format (*.nxa)
- Implantate von Drittanbietern für die Behandlungsplanung und geführte Chirurgie – nur Pilotbohrungen
- DICOM-Import (von (DVT)CT-Scannern) und STL/PLY-Import (von Desktop- oder intraoralen Scannern)
- DTX Studio™ Implant muss mit dem Onlineportal kompatibel sein – DTX Studio™ Go.

PRODUKTE MIT MESSFUNKTION

Die Messgenauigkeit hängt von den Bilddaten, der verwendeten Scanner-Hardware, seiner Kalibrierung und den Einstellungen für die Datenerfassung ab. Die Messung kann nicht genauer als die Bildauflösung sein. Die DTX Studio™ Implant Software gibt den Wert, gerundet auf eine Stelle nach dem Komma, beruhend auf den vom Anwender ausgewählten Punkten an.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht identifiziert für DTX Studio™ Implant.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie zum ersten Mal eine neue Komponente oder Behandlungsmethode anwenden, können Sie durch die Zusammenarbeit mit in diesem Bereich erfahrenen Kollegen mögliche Komplikationen vermeiden. Nobel Biocare bietet zu diesem Zweck ein globales Mentorennetzwerk.
- Es gibt keine 100%ige Erfolgsgarantie für Implantate. Insbesondere die Nichtbeachtung der Indikationen des Produkts und der chirurgischen Verfahren oder Gebrauchshinweise kann zu Fehlern oder Misserfolgen führen. Bei pädiatrischen Patienten ist die Routinebehandlung erst dann zu empfehlen, wenn der Kieferknochen vollständig ausgebildet und dies entsprechend dokumentiert ist.

- Präoperative Defizite des Knochens oder Weichgewebes können zu einem schlechten ästhetischen Ergebnis oder einer ungünstigen Implantatausrichtung führen. Es wird dringend empfohlen, NobelGuide® OP-Schablonen und Duplikate der Röntgenschablonen nur mit geeigneten Implantaten, chirurgischen Instrumenten und prothetischen Komponenten von Nobel Biocare zu verwenden. Die Kombination von Komponenten, die nicht zur gemeinsamen Verwendung vorgesehen sind, kann zum mechanischen Versagen von Implantaten und/oder Instrumenten, zu Gewebeschäden oder zu unbefriedigenden ästhetischen Ergebnissen führen.
- Vor der Planung eines extraoralen chirurgischen Verfahrens, sprich, einer kraniomaxillofazialen Versorgung mit Zahnimplantaten außerhalb des dentalen bzw. zygomatischen Bereichs, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, festzustellen, ob ein Implantat für die extraorale Verwendung geeignet ist.
- Hinweis: In den USA und bestimmten anderen Ländern ist die physische OP-Schablone für enossale Implantatinserterion ein Medizinprodukt. Bitte wenden Sie sich an die zuständige Regulierungsbehörde, um weitere Informationen über den Regulierungsstatus und die Anforderungen an die Herstellung dieser OP-Schablonen zu erhalten.

Warnungen

- Wenn Warnungen aufgrund der Zylinderformen ausgelöst werden, sind diese Warnungen auf der Basis der geschätzten Produktform berechnet worden.
- Nicht verfügbare Produkte werden im Fenster Produktauswahl mit einer roten Warnung und in der 3-D-Ansicht blau angezeigt. Das Bestellen dieser Produkte ist nicht möglich.

WARNUNGEN



- Das Planungsprogramm überprüft nicht automatisch alle technischen Einschränkungen. In einigen Fällen können die OP-Schablonen möglicherweise auch dann nicht gefertigt werden, wenn durch die Software keine technischen Beschränkungen automatisch identifiziert werden.
- Der Anwender muss mit der Interpretation von CT-Daten und der Darstellung von CT-Daten anhand der Volumendarstellung vertraut sein.
- Eine falsche Ausrichtung der (DVT)CT-Aufnahme und des Oberflächenscan führt zu einer falschen OP-Schablone und darf nicht für den Eingriff verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Darstellung von Daten (z. B. Ansichtsdarstellung, Objektfarben) sowie Warnhinweise in der DTX Studio™ Implant und X-Guide™ Software unterschiedlich sein können.
- Scanwarnungen:

Das DICOM-Set verfügt über weniger als zwei Schichten.

Das Schichtinkrement dieses DICOM-Datensatzes ist gleich null.

Die Schichtinkremente dieses DICOM-Datensatzes sind inkonsistent.

Das DICOM-Set weist keine Bildausrichtung auf.

Das DICOM-Set weist eine falsche Bildausrichtung auf.

Die Schichtdicke des DICOM-Datensatzes ist zu hoch.

Der DICOM-Datensatz weist ein Verschwenken der Abtasteinheit auf.

Die Schichtabstände des DICOM-Datensatzes sind zu hoch.

(Das DICOM-Set kann zwar verwendet werden, dies erfolgt jedoch auf eigenes Risiko.)



CYBERSICHERHEIT

Es wird die Installation einer aktivierten und aktualisierten Antivirus- und Anti-Malware-Software zusammen mit einer ordnungsgemäß konfigurierten Firewall auf dem Computer empfohlen, auf dem DTX Studio™ Implant verwendet werden soll. Darüber hinaus sollten Sie den Computer immer sperren, wenn er unbeaufsichtigt ist.

KOMPATIBILITÄT

DTX Studio™ Implant ist nicht mit anderen Medizinprodukten verbunden. Die Software ist mit vorherigen Versionen von DTX Studio™ Implant kompatibel.

INTEROPERABILITÄT

DTX Studio™ Implant ist mit DTX Studio™ Clinic und DTX Studio™ Lab interoperabel.

VORGESEHENE LEBENSDAUER

Für Software ist die vorgesehene Lebensdauer unbefristet. Bei Verwendung mit den unterstützten Betriebssystemen wird die Leistungsfähigkeit gemäß dem Verwendungszweck aufrecht erhalten.

LEISTUNGSANFORDERUNGEN UND -GRENZEN

DTX Studio™ Implant weist Abhängigkeiten zum Betriebssystem, mit dem es verwendet wird, auf. Es ist daher wichtig, dass Sie sicherstellen, dass DTX Studio™ Implant nur mit einem unterstützten Betriebssystem verwendet wird. Weitere Informationen dazu, welche Betriebssysteme zulässig sind, können den Computerrichtlinien für DTX Studio™ Implant entnommen werden.

KLINISCHER NUTZEN UND UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

DTX Studio™ Implant ist eine Behandlungskomponente mit einem Zahnimplantatsystem und/oder Zahnkronen und -brücken. Der zu erwartende klinische Nutzen der Behandlung ist, dass bei den Patienten fehlenden Zähne ersetzt und/oder Kronen versorgt werden.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

AUSSTATTUNG UND SCHULUNG

Es wird Zahnärzten – sowohl Neueinsteigern als auch erfahrenen Anwendern von Zahnimplantaten, Prothesen und dazugehöriger Software – nachdrücklich empfohlen, an einer speziellen Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue Behandlungsmethode anwenden. Nobel Biocare stellt ein vielseitiges Schulungsangebot für jeden Kenntnisstand zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nobelbiocare.com.

HINWEIS BEZÜGLICH SCHWERWIEGENDER EREIGNISSE

Wenn während der Verwendung dieser Komponente oder aufgrund ihrer Verwendung ein schwerwiegendes Ereignis auftritt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen Regulierungsbehörde. Die Kontaktinformationen des Herstellers dieser Komponente, dem ein schwerwiegendes Ereignis zu melden ist, sind wie folgt:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

ZUSATZINFORMATIONEN

Weitere Informationen zum NobelGuide® Konzept und zur chirurgischen Vorgehensweise erhalten Sie von einem Nobel Biocare (Außendienst) Mitarbeiter. Die Leistung von DTX Studio™ Implant hängt von dem verwendeten Betriebssystem ab. Stellen Sie daher sicher, dass DTX Studio™ Implant mit einem unterstützten Betriebssystem verwendet wird. Wenden Sie sich an den Technical Support, um weitere Informationen zu zulässigen Betriebssystemen und zur Installation von DTX Studio™ Implant zu erhalten.


Start

DAS BEHANDLUNGSKONZEPT

Eine **Behandlung** ist die Gesamtheit an **Behandlungsplänen** in Bezug auf einen Patienten. Eine neue Planung kann eingeleitet werden, wenn ein neuer Patient erstellt oder mit einem vorhandenen Patienten gearbeitet wird. Sie können zum Beispiel separate Behandlungen für den Ober- und Unterkiefer erstellen.

Ein **Behandlungsplan** beinhaltet das grundlegende Patientenmodell, den Dentalscan, das Wax-up und/oder die Röntgenschablone sowie alle Planungsprodukte in der aktuellen Fallkonfiguration eines bestimmten Patienten.


ÖFFNEN VON DTX STUDIO™ IMPLANT

Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol  auf Ihrem Desktop, um DTX Studio™ Implant zu öffnen. Die Software wird im Office-Modul geöffnet. In diesem Modul können Sie sich anmelden, um mit der Arbeit mit Patientendateien zu beginnen.

GRUNDLEGENDE AKTIONEN MIT PATIENTENDATEIEN

Hinweis: Melden Sie sich bei DTX Studio™ Implant an, um mit Patientendateien arbeiten zu können.


Erstellen einer neuen Patientendatei

Zum Erstellen einer neuen Patientendatei klicken Sie in der Symbolleiste auf der Registerkarte **Medizinischer Datensätze** auf **Neu** . Wählen Sie im Dialogfeld **Neuer Patient** an, ob Sie ein 3-D-Patientenmodell erstellen, einen Scan eines Gipsmodells bestellen oder Patienteninformationen eingeben möchten.


Eine vorhandene Patientendatei öffnen

Zum Öffnen einer Patientendatei doppelklicken Sie in der Liste auf den Patientennamen. Das Dialogfeld **Medizinischer Datensatz** wird geöffnet. Geben Sie an, ob Sie zum Modul für das Erstellen eines 3-D-Plans wechseln, Patienteninformationen eingeben, weitere Produkte bestellen oder einen Behandlungsplan besprechen möchten.


Einen Behandlungsplan öffnen

Wenn bereits eine bestimmte Patientendatei geöffnet ist und Sie einen Behandlungsplan für diesen Patienten öffnen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte **DTX Studio Implant** in der Symbolleiste und dann auf die Option **Öffnen** . Das Fenster **Planungsüberblick** wird angezeigt. Wählen Sie den Behandlungsplan aus und klicken Sie auf **Szenario öffnen**.

Einen Behandlungsplan speichern

Verwenden Sie zum Speichern eines Behandlungsplans die Option **Speichern**  auf der Registerkarte **DTX Studio Implant** oder drücken Sie [STRG + S].


Einen Behandlungsplan kopieren

Um eine Kopie der Behandlung zu speichern, z. B. zur Erstellung einer Behandlung für den gegenüberliegenden Kiefer mit einer Kopie der Daten, wählen Sie **Speichern als** in der Registerkarte **DTX Studio Implant** und dann **Neue Behandlung** .

Einen Behandlungsplan umbenennen oder löschen

Verwenden Sie zum Umbenennen oder Löschen eines Behandlungsplans die Option **Verwalten** auf der Registerkarte **DTX Studio Implant**. Dies ist nur möglich, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind.

Behandlungsplan schließen

Zum Schließen eines Behandlungsplans klicken Sie auf die Registerkarte **DTX Studio Implant** in der Symbolleiste und dann auf die Option **Planung schließen** . Der Behandlungsplan wird geschlossen, und das Dialogfeld **Planungsüberblick** wird angezeigt.

Eine Patientendatei schließen

Zum Schließen einer Patientendatei klicken Sie auf die Registerkarte **DTX Studio Implant** in der Symbolleiste und wählen Sie im Menü die Option **Patient schließen**. Wenn das Dialogfeld **Medizinischer Datensatz** angezeigt wird, klicken Sie auf **Patient schließen**. Wenn in der Patientendatei ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, verlangt das System eine Aktion: **Speichern**, **Nicht speichern** oder **Abbrechen**, um die Patientendatei nicht zu schließen.

Patientendateien archivieren


Um Patientendateien ins Archiv zu verschieben, klicken Sie auf **Archivieren**  in der Registerkarte **Medizinische Datensätze**.

SUPERSSEDED

Anwenderidentifizierung

Möglicherweise wird der Computer mit DTX Studio™ Implant von mehreren Anwendern verwendet. Um sicherzustellen, dass sich nur autorisierte Anwender anmelden und DTX Studio™ Implant verwenden können, ist eine korrekte Identifizierung der Anwender erforderlich. Die Software verwendet dann die richtigen Anwenderinstellungen und Regeln zur Durchsetzung des Patientendatenschutzes. Zwei-Faktor-Authentifizierung kann über DTX Studio™ Go eingerichtet werden, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

ANMELDEN

1. Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol , um die Software zu öffnen.
2. Wählen Sie den Anwender aus.
3. Geben Sie das dazugehörige Passwort ein.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.

Geben Sie bei der ersten Anmeldung das Passwort ein, dass Sie in der Registrierungs-E-Mail erhalten haben. Ändern Sie der Anforderung entsprechend das Passwort. Das Passwort sollte sicher und so stark wie möglich sein und keine offensichtlichen Wörter enthalten (verwenden Sie z. B. keine persönlichen Daten, wie das Geburtsdatum usw.).

Wenn Sie **Automatisch anmelden** auswählen, wird das DTX Studio™ Implant Anmeldedialogfeld nicht mehr auf dem verwendeten Computer angezeigt.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Wenn in DTX Studio™ Go die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet wurde, müssen Sie ein Passwort und einen sechsstelligen Verifizierungscode eingeben, um sich anzumelden. Sie werden alle 30 Tage aufgefordert, einen neuen sechsstelligen Verifizierungscode einzugeben.

ANWENDERWECHSEL

Wechseln Sie in DTX Studio™ Implant zwischen Anwendern, indem Sie die Option **Konto wechseln** im Menü **DTX Studio Implant** im Modul **My Office** verwenden.

ACCOUNT-DETAILS VERWALTEN

Öffnen Sie das Dialogfeld **Kontoverwaltung**, um Lizenz- oder Kontoinformationen abzurufen, Details zu bearbeiten oder ein Passwort zu ändern oder um Verbindungen oder Berechtigungen in einer Praxis zu verwalten:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **DTX Studio Implant** im Modul **My Office**.
2. Wählen Sie **Kontoverwaltung**.
3. Im Dialogfeld **Kontoverwaltung** werden die vorhandenen Informationen angezeigt.

Praxislizenzversion

DTX Studio™ Implant kann als Version für die gesamte Praxis mehrfach installiert werden und von verschiedenen Anwendern der Zahnarztpraxis genutzt werden. So können Patientendateien zentral in einem gemeinsamen Netzwerkordner gespeichert und von verschiedenen Orten aus problemlos aufgerufen zu werden.

INSTALLIEREN DER PRAXISLIZENZVERSION

Wenden Sie sich an Technical Support, um weitere Informationen zur Registrierung und Installation von DTX Studio™ Implant zu erhalten.

KONTOVERWALTUNG

Zum Verwalten der in Ihrer Praxis vorhandenen Anwenderkonten und Festlegen der entsprechenden Anwenderberechtigungen öffnen Sie das Dialogfeld **Kontoverwaltung** über die Option **Kontoverwaltung** im Menü **DTX Studio Implant**.


HINZUFÜGEN VON ANWENDERN

Kontaktieren Sie den lokalen Nobel Biocare Kundenservice oder Support-Desk, um neue Anwender hinzufügen zu lassen.




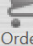
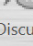
SUPERSEDED

Die Software im Überblick

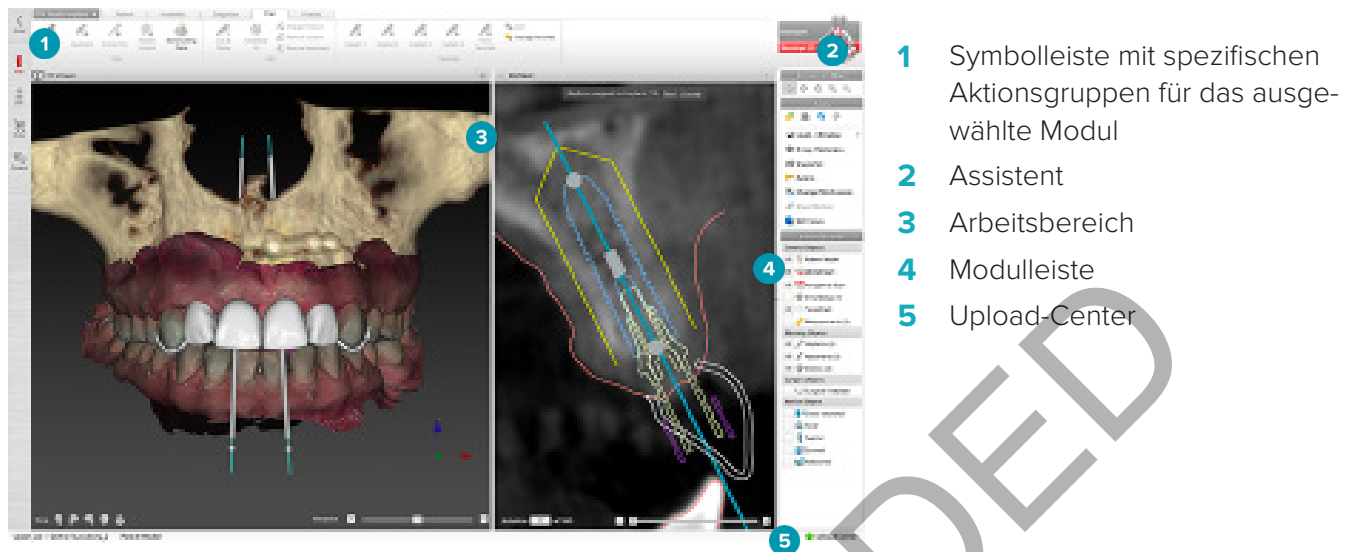Die Hauptkomponenten der grafischen Benutzeroberfläche sind in der Abbildung unten dargestellt.



Klicken Sie auf die Symbole in der Modulleiste, um durch die verschiedenen Module von DTX Studio™ Implant zu navigieren:

	Start/My Office – Verwaltung von Patienten und Kalibrierungssets
	3-D-Planung – Import von DICOM-Dateien, Erstellen von Patienten- und Röntgenschablonen, Diagnosen und Planungen
	Patienteninfo – Speicherung von Patienteninformationen und Verwaltung klinischer Bilder in der Patientenbibliothek
	Bestellmodul – Bestellung von Scans des Gipsmodells oder Wax-ups, TempShells oder der OP-Schablone und des Duplikats der Röntgenschablone sowie standardisierten Komponenten
	Diskutieren – Austausch mit Kollegen und Patienten über den Behandlungsplan mithilfe von Ansichtsdateien, Berichten und/oder Communicator-Präsentationen sowie Verbindung von DTX Studio™ Implant mit OsseoCare™ Pro durch die Erstellung von OsseoCare™ Pro Eingriffen


Durch Doppelklicken auf einen Patientennamen werden die gewünschten Patientendaten im Modul **My Office** geöffnet. Wählen Sie **3-D-Planung**, um die Diagnose oder Behandlungsplanung zu beginnen.

ARBEITSBEREICH


Bei der Planung in DTX Studio™ Implant ist es wichtig, dass die Patientendaten auf verschiedene Weise betrachtet werden können. Welche Ansicht benötigt wird, richtet sich nach den jeweils vom Anwender benötigten Informationen. Diese unterschiedlichen Arten der Datendarstellung werden Arbeitsbereiche genannt.

WAS IST EIN ARBEITSBEREICH?

Ein Arbeitsbereich ist eine Anordnung von 3-D- und 2-D-Ansichten sowie der entsprechenden Editor-Fenster in der Seitenleiste rechts auf dem Bildschirm. Er dient als Darstellungs- und Interaktionsplattform für 3-D-Objekte und/oder 2-D-Bilddaten. Sie können zwischen den verschiedenen im System verfügbaren Ansichtslayouts wechseln, um die präoperativen Bilddaten aufzurufen.

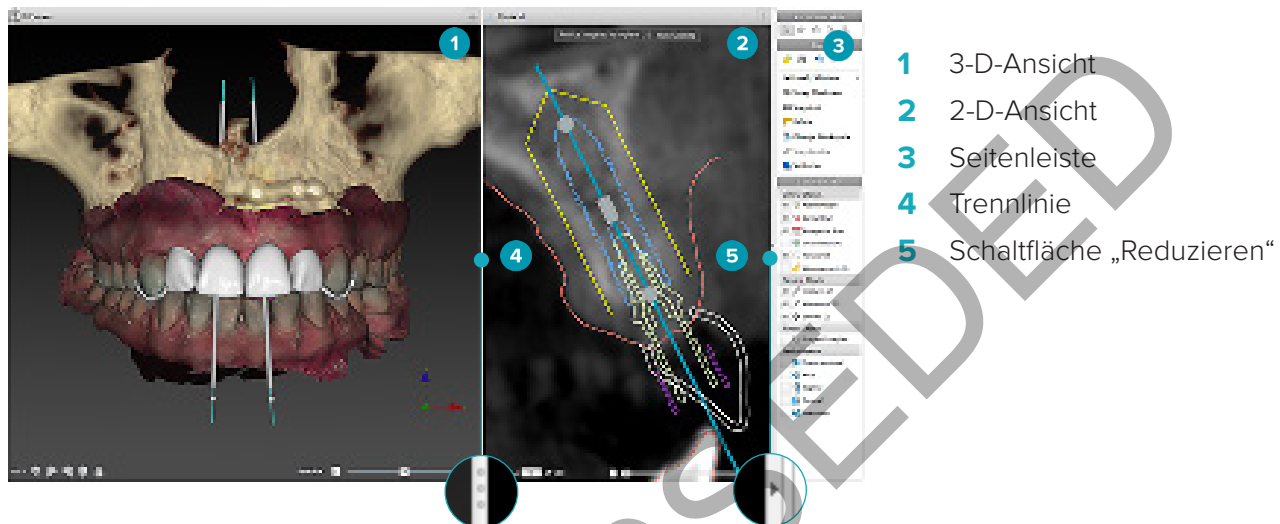



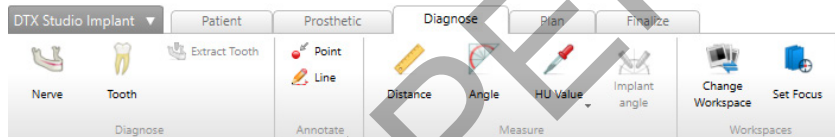


SYMBOLLEISTE



Im Arbeitsbereich oben werden nach Inhalt und Verwendung jene Werkzeuge angezeigt, welche für die Diagnose und Planung benötigt werden. Im Planungsmodul werden die zugehörigen Registerkarten bei der Auswahl der entsprechenden Objekte (z. B. 3-D-Schnitt, Implantate usw.) angezeigt. Diese Registerkarten – auch als kontextabhängige Registerkarten bezeichnet – sind eine weitere Möglichkeit, um auf Aktionen zuzugreifen, die Sie auch durch einen Rechtsklick auf ein Objekt im jeweiligen Popup-Menü aufrufen können.

INTERAKTION IN DEN ANSICHTEN

Für das Interagieren mit 3-D-Modellen stehen verschiedene Interaktionsmodi zur Verfügung. Sie können zwischen den Interaktionsmodi wechseln, indem Sie auf die Symbole in der Interaktionssymbolleiste klicken, über das Kontextmenü **Interaktion** und über eine Reihe von Tastenkombinationen.

	Interaktionsmodus	Auswählen oder Identifizieren eines Objekts für eine Aktion durch Drücken der linken Maustaste
	Rotationsmodus	Rotieren der 3-D-Darstellung (nur 3-D) mit Hilfe der Maus
	Schwenkmodus	Verschieben der Darstellung durch Ziehen mit der Maus
	Zoommodus	Vergrößern oder Verkleinern durch Ziehen mit der Maus
	Zoombereichsmodus	Zoomen eines bestimmten Bereichs der Darstellung durch Aufziehen eines Rechtecks (nur in 2-D)

Wechseln zwischen verschiedenen Interaktionsmodi durch Tastenkombinationen:

Strg (Befehl) oder mittlere Maustaste	Von einem anderen Modus in den Schwenkmodus wechseln. Der Schwenkmodus bleibt aufrechterhalten, solange die Taste gedrückt wird. Lassen Sie die Taste los, um in den ursprünglichen Modus zurückzukehren.
Alt	Von einem anderen Modus in den Rotationsmodus wechseln. Der Rotationsmodus bleibt aufrechterhalten, solange die Taste gedrückt wird. Lassen Sie die Taste los, um in den ursprünglichen Modus zurückzukehren.
Umschalttaste	Von einem anderen Modus in den Zoommodus wechseln. Der Zoommodus bleibt aufrechterhalten, solange die Taste gedrückt wird. Lassen Sie die Taste los, um in den ursprünglichen Modus zurückzukehren.
Tabulatortaste	Zwischen Interaktionsmodus und Rotationsmodus wechseln

In der 3-D-Ansicht ist eine Reihe von Standardansichten verfügbar.



Klicken Sie auf die Symbole, um zur entsprechenden Standardansicht des Modells zu gelangen.

	Frontal – Frontale Standardansicht – Tastenkombination [5]
	Links – Linkslaterale Standardansicht – Tastenkombination [1]
	Rechts – Rechtslaterale Standardansicht – Tastenkombination [3]
	Von oben nach unten – Kranio-kaudale Standardansicht – Tastenkombination [9]
	Von oben nach unten – Kranio-kaudale Standardansicht – Tastenkombination [7]

BEARBEITEN VON OBJEKTEN

1. Wählen Sie zum Auswählen eines Objekts den Interaktionsmodus aus und klicken Sie auf das Objekt. In der 3-D-Ansicht zeigt eine weiße Umrisslinie an, dass das Objekt aktiviert ist. In der 2-D-Ansicht ist die Umrisslinie des gewählten Objekts farbig.

Hinweis: Das Patientenmodell bildet in diesem Fall eine Ausnahme. Beim Auswählen des Patientenmodells ist keine Konturlinie sichtbar.


2. Wählen Sie den 3-D-Schnitt, ein Implantat oder einen Verankerungsstift aus und greifen Sie auf die entsprechenden Aktionen über die zugehörige Registerkarte in der Symbolleiste zu.
3. Durch einen Rechtsklick auf das gewählte Objekt wird ein Fenster geöffnet, welches weitere Bearbeitungs- und Einstellmöglichkeiten anzeigt.




EIN- UND AUSBLENDEN VON OBJEKTEN

Um die Behandlung eines Patienten effizient zu planen, ist es sinnvoll, während der Planungsphase nur die relevanten Objekte anzuzeigen.

Ein einzelnes Objekt kann über das Kontextmenü oder über die Tastenkombination [H] ausgeblendet werden. Mit dem **Visibility Editor** kann die Anzeige der Standardobjekte durch einen einzigen Mausklick aktiviert oder deaktiviert werden.

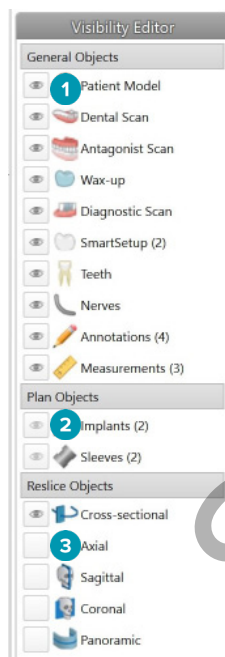Für Gruppenobjekte sind verschiedene Anzeigesymbole verfügbar:



- 1 Wenn das schwarze Anzeigesymbol  vor der Gruppe angezeigt wird, bedeutet dies, dass alle zur Gruppe gehörigen Objekte angezeigt werden.
- 2 Wenn das graue Anzeigesymbol  vor der Gruppe angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Objekte der Gruppe ausgeblendet sind.
- 3 Wenn kein Symbol  vor der Gruppe angezeigt wird, bedeutet dies, dass alle zur Gruppe gehörigen Objekte ausgeblendet sind.

BEARBEITEN VON CT-SCHICHTEN

Blättern durch CT-Bilder

DTX Studio™ Implant ist mit einer Reihe von Tools ausgestattet, wie Mousrad, Schieberegler und Schichteingabefeld, um durch die Schichten navigieren zu können.

LEVEL/WINDOW

Mit dem Tool „Level/Window“ können in der 2-D- und in der 3-D-Ansicht die Einstellungen für „Level“ und „Window“ für die Werte geändert werden, mit denen die Daten in ein Bild oder ein Modell konvertiert werden. Das Ergebnis ist abhängig vom Bildtyp (2D und 3D).

Level/Window in 2-D

Der Kontrast von CT-Schichten sowie von Panorama-Ansichten wird durch die Window- und Level-Werte definiert. Mit der Einstellung „Level/Window“ werden die auf dem Bildschirm angezeigten Grauwerte festgelegt. Es wird eine Auswahl zentriert um den Level-Wert und mit der Breite des Window-Werts (gleichmäßig geteilt auf beiden Level-Seiten) angezeigt. Der Kontrast der CT-Schichten kann durch das Ändern dieser Einstellungen angepasst werden.

Die Level-Einstellung wird durch Drücken der Maustaste und durch Verschieben der Maus nach oben und unten geändert. Die Window-Einstellung wird durch Drücken der Maustaste und durch Verschieben der Maus nach links (vermindern) und rechts (erhöhen) verändert.

Level/Window in 3-D



Das Tool „Level/Window“ wird in der 3-D-Ansicht zur Kontrolle der Skalierung oder des Mittelpunkts der Transferfunktion verwendet, um das Rauschen im Patientenmodell zu reduzieren oder um die Farbeinstellungen anzupassen. Diese Einstellungen können die Darstellung des Patientenmodells verbessern.

Wenn Sie die Maustaste drücken oder den Cursor unter Verwendung der Maus nach oben oder unten ziehen, wird der Mittelpunkt der Übertragungsfunktion verschoben, ohne dass sich dies auf die Breite des Bereichs auswirkt. Wenn Sie die Maustaste drücken oder den Cursor nach links oder rechts über das Patientenmodell ziehen, wird der Bereich der Werte, mit denen das Patientenmodell erstellt wird, entsprechend erweitert oder eingeschränkt.

Patientenmodell

ERSTELLEN EINES 3-D-PATIENTENMODELLS


Sie müssen zum Erstellen eines fehlerfreien 3-D-Patientenmodells die korrekten DICOM-Dateien auswählen, damit das gewünschte Volumen, der optimale Isowert und der richtige Kiefertyp eingestellt werden. Der Assistent zum Erstellen von Patienten führt Sie durch diese Schritte.

1. Rufen Sie den Assistenten für die **Patientenerstellung** auf, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Klicken Sie auf **Neu**  in der Registerkarte **Medizinische Datensätze** der Symbolleiste DTX Studio™ Implant und klicken Sie dann auf **Neue Planung erstellen**.
 - Klicken Sie im Planungsmodul auf **Patient**  auf der Registerkarte **Patient** der Symbolleiste **Planung**.
2. Wählen Sie das richtige Set aus der Liste geladener DICOM-Sets aus oder importieren Sie das richtige Set.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Stellen Sie das gewünschte Volumen auf der Seite **Gewünschtes Volumen und Isowert festlegen** ein.
5. Legen Sie anhand des Schiebereglers für den **Isowert** einen entsprechenden Isowert fest und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Passen Sie die Scannerausrichtung an, und stellen Sie die okklusale Ebene mit den Schiebereglern ein.
7. Wählen Sie den Kiefertyp aus, der bei diesem Patienten zu versorgen ist.
8. Klicken Sie auf **Fertig**.

BEARBEITEN DER FORM DER QUERSCHNITTKURVE

Für eine optimale Querschnittskurve müssen die 3-D-Schnitte immer senkrecht zur okklusalen Ebene platziert werden. Beim Erstellen eines neuen Patientenmodells wird eine Standard-Querschnittskurve basierend auf den Einstellungen für Kiefertyp, gewünschtes Volumen und okklusale Ebene berechnet. Die Form dieser Kurve kann wie die Größe des 3-D-Schnitts bearbeitet werden.


So passen Sie die Form von Querschnittskurven an:

1. Klicken Sie auf **Querschnittskurve**  in der Gruppe **CT-Editor** auf der Registerkarte **Patient**.
2. Die Aktion **Querschnittskurve anpassen** wird gestartet.
3. Optimieren Sie die berechnete Kurve durch Bearbeitung der vorhandenen Kontrollpunkte oder generieren Sie durch Platzierung von Zahnkontrollpunkten eine ganz neue Kurve.

Bearbeiten vorhandener Kontrollpunkte

1. Klicken Sie auf die Kontrollpunkte, und ziehen Sie sie an die gewünschten Positionen, um die Form der Querschnittskurve zu ändern.
2. Fügen Sie einen Punkt ein, fügen Sie einen Endpunkt hinzu, oder wählen Sie einen Punkt aus und entfernen Sie ihn dann.
3. Klicken Sie auf **Fertig**, wenn die Kurve die gewünschte Form hat.

Verwenden von Zahnkontrollpunkten

1. Klicken Sie auf **Kurven neu angeben** .
2. Befolgen Sie die Anweisungen in den Bildinfos, um die Zahnkontrollpunkte angemessen zu platzieren:
 - Klicken Sie auf die Axialansicht, um die Position des dritten Molars rechts (Weisheitszahn) anzugeben.
 - Klicken Sie auf die Axialansicht, um die Position des nächsten Zahns, also des Eckzahns anzugeben.
 - Klicken Sie auf die Axialansicht, um die Position des Eckzahns auf der linken Seite anzugeben.
 - Klicken Sie auf die Axialansicht, um die Position des vierten Zahns, des dritten Molars links (Weisheitszahn) anzugeben.


Hinweise:

- Die in den Bildinfos angegebenen Zahnnummern variieren in Abhängigkeit vom verwendeten Zahnnotationssystem. Diese Notation kann in den **Allgemeine Einstellungen** geändert werden.
- Wenn Zahnmarkierungen an Stellen positioniert werden müssen, an denen keine Bezeichnung mehr vorhanden ist, platzieren Sie die Markierungen dort, wo sich die Zähne befinden müssten.

3. Diese vier Punkte – die zwei dritten Molare und die zwei Eckzähne – bilden nun zusammen mit fünf automatisch generierten Kontrollpunkten die Basis für die Querschnittskurve.
4. Überprüfen Sie die Kurve, und nehmen Sie bei Bedarf Feineinstellungen vor.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, wenn die Kurve die gewünschte Form hat.

Einstellen der Größe der Querschnittsansicht

Stellen Sie die Größe der Senkrechtsansicht ein, um das richtige Bild im 3-D-Schnitt anzuzeigen:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Querschnittskurve** , um die Aktion **Querschnittskurve anpassen** zu öffnen.
2. Ziehen Sie die Ränder des in der Senkrechtsansicht gezeigten Bereichs nach oben, unten, links oder rechts.

Hinweis: Die oberen und unteren Ränder können unabhängig voneinander gezogen werden. Wenn der linke oder rechte Rand gezogen wird, bewegt sich der gegenüberliegende Rand in entgegengesetzter Richtung um die gleiche Strecke, um die zentrale Position des Schnittbilds aufrechtzuerhalten.

DARSTELLUNG DES PATIENTENMODELLS

Warnung



Der Anwender muss mit der Interpretation von CT-Daten und der Darstellung von CT-Daten anhand der Volumendarstellung vertraut sein.

Was ist eine Übertragungsfunktion?

Bei der Erstellung eines Patientenmodells wird jeder Grauwert in eine bestimmte Farbe mit einer gewissen Lichtundurchlässigkeit umgewandelt. So erhält das Patientenmodell sein typisches Aussehen. Um dies zu erreichen, wird deshalb eine Übertragungsfunktion genutzt, die jedem Voxel im Volumen die entsprechenden RGB-Werte und die passende Lichtundurchlässigkeit zuweist. Durch das Anwenden der Übertragungsfunktion wird das 3-D-Volumen visualisiert.

Übertragungsfunktionen können anhand der Galerie zur **Übertragungsfunktion** verwaltet und auf das Patientenmodell angewendet werden. Diese Galerie enthält Miniaturansichten der verfügbaren Übertragungsfunktionen sowie eine Reihe von Aktionen, die für diese Übertragungsfunktionen ausgeführt werden können. Es wird zwischen **integrierten Schablonen**, **benutzerdefinierten Schablonen** und den Übertragungsfunktionen **Dieser Patient** für den aktuellen Patienten unterschieden.

BEREINIGEN DER DARSTELLUNG DES PATIENTENMODELLS

Im Modus „Planung“ erfolgt die Bereinigung von Artefakten und störender Partikel in der 3-D-Ansicht über die Aktionen **Patientenmaske** oder **Knochenartefakte löschen**.

Patientenmaske

1. Klicken Sie auf **Patientenmaske** .
2. Klicken Sie in der Aktion **Patientenmaske** auf die folgenden Symbole:



Klicken Sie auf **Ausschneiden**, um den Teil des Volumens anzugeben, der aus dem Modell entfernt werden soll. Alles innerhalb des gezeichneten Polygons wird ausgeblendet.



Klicken Sie auf **Isolieren**, um den Teil des Volumens anzugeben, der sichtbar sein soll. Alles außerhalb des gezeichneten Polygons wird ausgeblendet.








Klicken Sie auf **Hinzufügen**, wenn der abgeschnittene Teil des Volumens wieder hinzugefügt werden soll.

Zeichnen Sie nun das Polygon:


- Klicken Sie mit der linken Maustaste.
- Bewegen Sie die Maus und klicken Sie noch einmal. Die beiden angeklickten Positionen werden mit einer grünen gepunkteten Linie verbunden.
- Klicken Sie ein drittes Mal. Die grüne gepunktete Verbindungslinie wird zu einem Polygon.
- Fahren Sie fort, bis der Teil, der vom Modell abgeschnitten werden soll, von einem Polygon umschlossen ist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, oder drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Vorgang abzuschließen.

Löschen von Knochenartefakten


1. Klicken Sie auf **Knochenartefakte löschen**  in der Gruppe **Patienten-Editor** auf der Registerkarte **Patient**. Die Aktion **Knochenartefakte löschen** wird gestartet.
2. Klicken Sie auf **Magischer Radierer**  oder **Radierer**  in der Aktion **Knochenartefakte löschen**.
3. Klicken Sie auf die CT-Daten, oder halten Sie die Maustaste gedrückt, um die Teile zu markieren, die Sie aus dem Patientenmodell entfernen möchten. Mit **Magischer Radierer**  wird die Abdeckung in einem kleinen, mittelgroßen oder großen Bereich (abhängig von der Pinselgröße) rund um die angeklickte Position entfernt. Mit **Radierer**  wird die Abdeckung vollständig aus einem kreisförmigen Bereich rund um die angeklickte Position entfernt. Die Größe der Sphäre hängt von der Pinselgröße ab, die geändert werden kann.

Hinweis: Die Aktion **Knochenartefakte löschen** wirkt sich nicht auf die CT-Originaldaten aus. Wenn Artefakte entfernt wurden und das Patientenmodell anschließend mit der Aktion **Patienten bearbeiten** bearbeitet wird, werden die Artefakte wieder in das Modell aufgenommen. Wenn Sie also zum Erzielen besserer Ergebnisse beide Aktionen ausführen müssen, empfiehlt Nobel Biocare, zunächst das Patientenmodell zu bearbeiten, bevor Sie mögliches Bildrauschen und Artefakte löschen.


Maske deaktivieren

Klicken Sie auf **Maske deaktivieren** , um zwischen dem vollständigen Patientenmodell und der entsprechenden Auswahl zu wechseln.

Patientenmaske zurücksetzen

Klicken Sie auf **Patientenmaske zurücksetzen** , um das vollständige Patientenmodell erneut so anzuzeigen, wie es erstellt wurde.

Größten Teil erhalten

Bei den Feineinstellungen für das Modell mithilfe der Aktion **Patientenmaske** haben Sie die Möglichkeit, den größten „Knochenteil“ im Modell zu isolieren, anstatt alle kleineren Partikel zu entfernen, die die Sicht versperren. Klicken Sie dazu auf **Größten Teil erhalten**  in den Aktionen **Patientenmaske** oder **Knochenartefakte löschen**. Die kleineren Partikel und Teile, die eine andere Dichte als die Knochen aufweisen, werden entfernt. Der größte Knochenteil bleibt sichtbar.

Prothetische Informationen

DIAGNOSTISCHE ZAHNAUFSTELLUNG

Je nach medizinischer Indikation stehen in DTX Studio™ Implant zwei Arten von Scanprotokollen für die virtuelle diagnostische Zahnaufstellung zur Verfügung:

- Für Patienten mit teilbezahntem Kiefer (vorzugsweise mindestens sechs Zähne vorhanden) kann das Protokoll ohne Röntgenschablone (unter Verwendung eines Scans der intraoralen Situation) befolgt werden.
- Für Patienten mit zahnlosem Kiefer oder größtenteils unbezahntem Kiefer (empfohlen, wenn weniger als sechs Zähne vorhanden sind) muss das Protokoll mit Röntgenschablone befolgt werden.


Dentalscan

Scan des Gipsmodells

Das Gipsmodell wird durch Abformung erstellt und bildet die intraorale Situation des Patienten ab. Eine prothetische Versorgung kann unter Verwendung einer prothetischen Zahnaufstellung bzw. eines Wax-ups auf Basis des Gipsmodells gefertigt werden. Die Oberfläche dieses Modells kann von Ihrem Dentallabor exakt eingescannt (digitalisiert) werden. Dieser Oberflächenscan kann in DTX Studio™ Implant importiert und an dem aus den DICOM-Daten erstellten 3-D-Patientenmodell ausgerichtet werden.

Nachdem Sie die Abformung erstellt haben, melden Sie sich bei DTX Studio™ Implant an, öffnen die Patientendatei und geben einen Scan des Gipsmodells bei Ihrem Dentallabor in Auftrag. Nachdem das Dentallabor die Scandatei in den Cloud-Service hochgeladen hat, können Sie den Scan mithilfe von SmartFusion™ herunterladen und an den DICOM-Daten des Patientenmodells ausrichten.

Bestellen eines Scans des Gipsmodells

1. Öffnen Sie eine Patientendatei, klicken Sie auf **Produkte bestellen**, um das Bestellmodul aufzurufen, und klicken Sie auf **Scan** .
2. Geben Sie die Scanobjekte in der Zahnübersicht an, indem Sie den zu scannenden Bereich ziehen und die erforderliche Option aus dem Popup-Menü auswählen. Die angeforderten Scans werden in der Liste auf der rechten Seite angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie das verbundene Dentallabor aus, das das Gipsmodell für Sie scannen wird. Geben Sie alle notwendigen Details an sowie spezielle Anweisungen an, die erforderlich sind, und prüfen Sie die Liste der angeforderten Scans.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.
6. Der Auftrag wird an das Dentallabor gesendet und der Liste **Bestellungen** mit der Bestellnummer hinzugefügt, die vom Server vergeben wird.


Intraoraler Scan oder anderer Desktop-Scan

Die intraorale Situation des Patienten wird durch einen Oberflächenscan abgebildet, der zum Beispiel mit einem intraoralen Scanner erstellt wird. Dieser Oberflächenscan (d. h. PLY- und STL-Dateien) kann in DTX Studio™ Implant importiert werden und mithilfe von SmartFusion™ an dem aus DICOM-Daten erstellten 3-D-Patientenmodell ausgerichtet werden.

SMARTFUSION™


Hinzufügen des Dentalscans zum Patientenmodell

Der erhaltene Oberflächenscan (vom Dentallabor hochgeladen oder aus dem intraoralen Scanner importiert) kann an dem Patientenmodell ausgerichtet werden.

1. Öffnen Sie die Behandlung im Planungsmodul.
2. Klicken Sie auf **Dentalscan**  in der Gruppe **Behandlungsscan** auf der Registerkarte **Prothetik**.
3. Wählen Sie einen Dentalscan aus oder importieren Sie eine Dentalscandatei.
4. Wenn NXA-Dateien verwendet werden, wird der Scanner, mit dem das Dentalscan erfasst wurde, automatisch entsprechend der Daten in der ausgewählten Datei eingestellt. Wenn Sie STL-Dateien verwenden, müssen Sie den Scanner einstellen:
 - Klicken Sie unten rechts im Fenster auf **Scanner auswählen** oder **Scanner ändern**, wenn bereits ein Scanner ausgewählt wurde.
 - Wählen Sie den Scanner in der Liste aus.
 - Klicken Sie auf **Scanner auswählen**.


Hinweis: Überprüfen Sie immer, welcher Scanner ausgewählt ist, besonders beim Importieren von NXA-Dateien oder wenn für die Erfassung von Dentalscans verschiedene Scanner verwendet werden. Wenn Sie einen bestimmten Scanner aus der Liste auswählen, wird er als Standard-Scanner für die Erstellung neuer Patientenmodelle gespeichert und verwendet.

5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wenn der Scanbereich bekannt ist, wird der Zahnbereich automatisch indiziert. So passen Sie den Bereich für den ausgewählten Dentalscan an:
 - Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Zahnübersicht entlang des Bogens.
 - Klicken Sie auf den Bogen – oder in die farbig hervorgehobene Fläche um den Bogen – und halten Sie die Maustaste gedrückt.
 - Ziehen Sie den Mauszeiger über die Zähne in der Zahnübersicht, bis der gesamte Scanbereich erfasst ist. Der Dentalscanbereich muss mindestens drei Zahneinheiten umfassen. Lassen Sie die Maustaste los.
 - Stellen Sie den Bereich ein, indem Sie auf die blau hervorgehobenen Bereiche klicken und eine Einheit ein- oder ausschließen. Um die Anpassung des Scanbereichs noch einmal neu vorzunehmen, klicken Sie auf **Schema/Übersicht zurücksetzen**. Stellen Sie sicher, dass Sie einen fortlaufenden Scanbereich angeben.

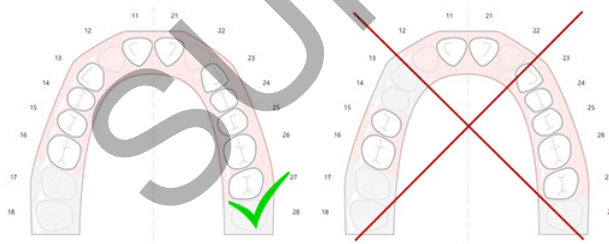

7. Geben Sie in der Zahnübersicht die fehlenden Zähne an, indem Sie auf einen weißen vorhandenen Zahn klicken und ihn in einen deaktivierten fehlenden Zahn umwandeln. Nur Zähne im markierten Zahnbereich können als fehlende Zähne angegeben werden. Nehmen Sie mindestens einen Restzahn in den Scanbereich auf.
8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Geben Sie anhand der Tipps des Assistenten alle Zahnpositionen an. Wenn Sie einen Seitenzahn angeben, klicken Sie in die Mitte des Höckers. Bei einem Eckzahn klicken Sie auf die Mitte der Schneidkante. Wenn Sie diese Schritte wiederholen möchten, klicken Sie auf **Punkte erneut angeben**. Die festgelegten Punkte werden entfernt und Sie können von vorn beginnen.
10. Klicken Sie auf **Weiter**.
11. Das Patientenmodell und der Dentalscan werden nun mit SmartFusion™ aneinander ausgerichtet.

12. Prüfen Sie auf der Seite **Ergebnis prüfen** des Assistenten, **ob die automatische Ausrichtung korrekt ist**. Der Umriss des ausgerichteten Dentalscans (standardmäßig rosa angezeigt) muss genau mit den okklusalen Zahndaten des (DVT)CT-Scans übereinstimmen. **Der Behandler ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass dieser Schritt richtig erfolgt ist** (siehe Abbildungen auf der nächsten Seite). Wenn er nicht richtig ausgeführt wurde, initialisieren Sie SmartFusion™. Wenn die beiden Modelle nicht korrekt aneinander ausgerichtet werden können, wenden Sie sich an den Kundendienst.
13. Wenn die Ausrichtung in Ordnung ist, klicken Sie auf **Fertig**.
14. Der Dentalscan wird der Ansicht hinzugefügt. Wenn der Scan der virtuellen Zähneoder der prothetischen Zahnaufstellung/des Wax-ups mitbestellt wurde, wird er ebenfalls automatisch hinzugefügt.

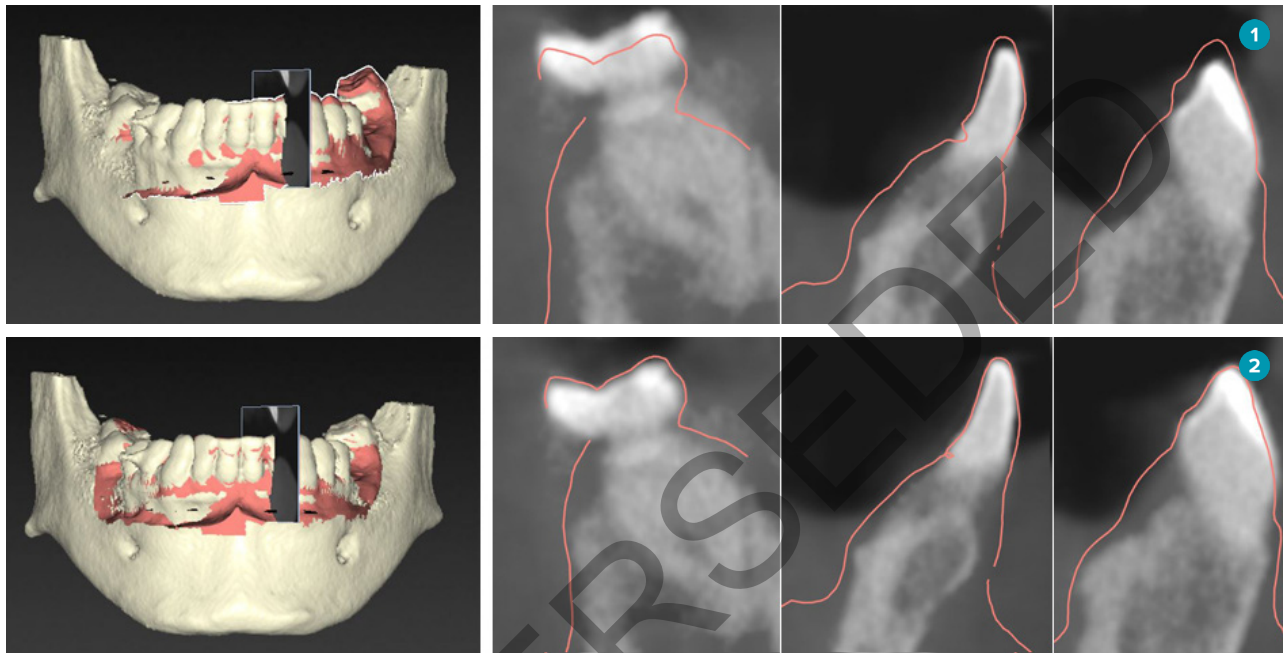

- 1** Falsche Ausrichtung
2 Korrekte Ausrichtung



Warnung

Eine falsche Ausrichtung der (DVT)CT-Aufnahme und des Oberflächenscan führt zu einer falschen OP-Schablone und darf nicht für den Eingriff verwendet werden.

Initialisierung von SmartFusion™

Wenn SmartFusion™ der Dentalscan und das Patientenmodell nicht oder nicht ausreichend akkurat zusammenfügt, passen Sie die Anfangsposition des Dentalscans an und starten Sie die SmartFusion™ Berechnung erneut. Dieser Vorgang wird als SmartFusion™ Initialisierung bezeichnet.


Hinweis: SmartFusion™ ist wahrscheinlich weniger akkurat, wenn der Patient weniger als sechs Restzähne hat.

Initialisierungsverfahren


Zur Initialisierung von SmartFusion™ müssen Sie mindestens drei Paare korrespondierender Punkte definieren, die jeweils auf den Zähnen des Patientenmodells und des Dentalscans gezeigt werden. Punkte, die Sie nicht korrekt platziert haben, können Sie wieder entfernen und erneut festlegen. Alle einander entsprechenden Punkte können mit einem einzigen Klick entfernt werden.

So starten Sie den Initialisierungsassistenten

- Um die Anfangsposition sofort anzupassen, wenn SmartFusion™ ausgeführt wird, rufen Sie den Assistenten durch Anklicken der Aktion **SmartFusion initialisieren** auf.

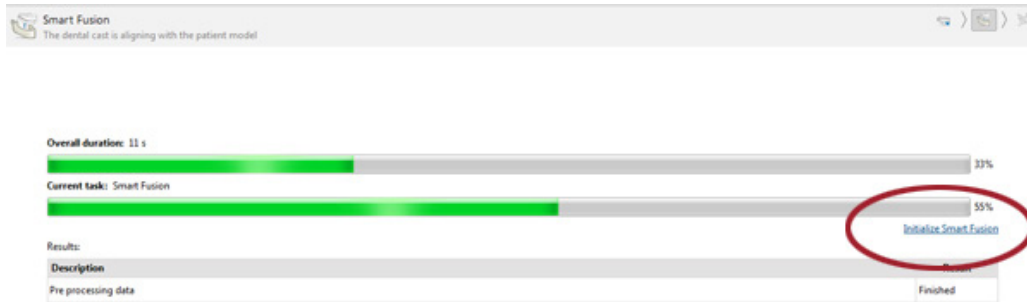

- Wenn **SmartFusion™** ausgeführt wird, der Vorgang jedoch fehlschlägt, wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf **Position initialisieren**, um den Initialisierungsassistenten zu starten. Sie können die Startposition des Dentalscans einstellen. Starten Sie SmartFusion™ neu.
- Wenn die Funktion **SmartFusion™** nach einem Initialisierungsversuch ausgeführt wird, der Vorgang jedoch erneut fehlschlägt, wird eine Warnmeldung angezeigt, und Sie werden zur Seite **Ergebnis prüfen** geleitet. Rufen Sie auf dieser Seite den Initialisierungsassistenten durch Anklicken von **Korrespondierende Punkte angeben** auf (siehe Abbildung unten).
- Wenn die Funktion **SmartFusion™** erfolgreich ausgeführt wird, der Dentalscan und das Patientenmodell jedoch nicht korrekt ausgerichtet sind, rufen Sie den Initialisierungsassistenten auf, indem Sie auf der Seite **Ergebnis prüfen** auf die Aktion **Korrespondierende Punkte angeben** klicken.

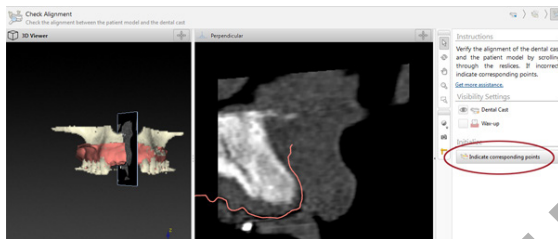


So definieren Sie korrespondierende Punkte mit dem Assistenten

Punkt einfügen

1. Beim Aufrufen des Assistenten wird die Aktion **Punkte einfügen** aktiviert.
2. Klicken Sie im linken Bereich des Patientenmodells auf eine spezifische Position auf den Zähnen.
3. Klicken Sie auf die entsprechende Position im rechten Bereich auf den Dentalscan. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie mindestens drei Paare korrespondierender Punkte definiert haben.
4. Kontrollieren Sie den Bereich „Warnungen“ des Assistenten auf Warnhinweise.
5. Wenn die Meldung angezeigt wird, dass die erforderliche Anzahl Punktpaare erreicht wurde, klicken Sie auf **Fertig**, um den Assistenten zu schließen. Stellen Sie sicher, dass alle Warnungen berücksichtigt wurden, bevor Sie den Assistenten schließen. Ansonsten können Sie diese Aktion nicht abschließen.


Tipp: Stellen Sie sicher, dass die hinzugefügten Punkte gleichmäßig über den gesamten Zahnbogen verteilt sind. Die Punkte sollen nicht zu nah beieinander liegen. Je größer der abgedeckte Bereich ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Ausrichtung korrekt erfolgt. Platzieren Sie die Punkte in mindestens zwei der vier Quadranten (siehe nachfolgende Abbildung).

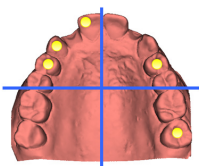


Ausgewählte Punkte entfernen

Hinweis: Wenn die Optionen zum Entfernen der Punkte deaktiviert sind, müssen Sie mit der rechten Maustaste klicken, um die Aktion **Punkte einfügen** abzuschließen. Damit werden die anderen Aktionen aktiviert.

So entfernen Sie ausgewählte Punkte:

1. Wählen Sie in einer der Ansichten einen Punkt aus.
2. Klicken Sie auf **Ausgewählte Punkte entfernen** .
3. Der ausgewählte Punkt und der mit ihm übereinstimmende Punkt werden entfernt.

Alle Punkte entfernen

Um alle angegebenen Punkte zu entfernen, klicken Sie auf **Alle Punkte entfernen** . Alle definierten virtuellen Punkte werden entfernt.

Warnungen bei der SmartFusion™ Initialisierung

Die Ausrichtung des Gipsmodell-Scans wurde manuell angepasst.

Wenn der Anwender sich anstatt für SmartFusion™ für die manuelle Ausrichtung des Dentalscans am Patientenmodell entscheidet oder die Ausrichtung des Gipsmodell-Scans wurde manuell angepasst, wird vom System eine Warnung ausgegeben, diese Ausrichtung zu überprüfen, um mögliche Ungenauigkeiten zu vermeiden.

Die Ausrichtung zwischen dem Patientenmodell und dem Gipsmodell-Scan wurde manuell angepasst. Stellen Sie sicher, dass der Gipsmodellscan mit dem (DVT)CT-Scan korrekt ausgerichtet ist, da Abweichungen zu Fehlern bei der korrekten Positionierung der Implantate führen können.

Ein oder mehrere Punktpaare stimmen nicht überein.

Das System misst den Abstand zwischen den auf dem Patientenmodell platzierten Punkten und den entsprechenden Punkten auf dem Dentalscan. Wenn der Abstand größer als erwartet ist, gibt das System eine Warnmeldung aus und fordert den Anwender auf, die Punktpaare anzupassen.

Die definierten Punkte sind nicht ausreichend über den Dentalscan verteilt.

Wenn das System erkennt, dass die definierten Punkte nicht über mindestens zwei der vier Quadranten verteilt sind, wird ein Warnhinweis generiert. Der Anwender wird aufgefordert, die korrespondierenden Punkte anzupassen oder ein neues Paar korrespondierender Punkte hinzuzufügen und dabei auf eine gute Verteilung über die Quadranten des Zahnbogens zu achten. Zu eng beieinander liegende Punkte sollten vermieden werden.



Indicate at least three corresponding points. (Legen Sie mindestens drei korrespondierende Punkte fest.)

Es wurde keine ausreichende Anzahl Punktpaare definiert, um den Assistenten abzuschließen. Platzieren Sie weitere Punktpaare, bis die Mindestanzahl erreicht ist.

GESICHTSSCAN

Laden Sie einen Gesichtsscan, der dem Patientenmodell zugeordnet werden soll. Es ist möglich, verschiedene Scans nacheinander zu laden. Um das beste Ergebnis zu erzielen, müssen Sie zuerst einen neutralen Gesichtsscan laden und diesen dem Patientenmodell zuordnen. Später können Sie einen Scan eines lächelnden Gesichts laden und beispielsweise dem neutralen Gesichtsscan zuordnen.


Hinzufügen eines Gesichtsscans zum Patientenmodell

1. Klicken Sie auf **Gesichtsscan**  in der Gruppe **Zusätzliche Scans** auf der Registerkarte **Prothetik**, um den Assistenten zu starten.
2. Klicken Sie auf **Gesichtsscan auswählen**. Wählen Sie einen Gesichtsscan (.obj) aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Überprüfen Sie die aktuelle Position des hochgeladenen Scans. Um die Ausrichtung zwischen dem geladenen Gesichtsscan und dem Patientenmodell anzupassen, klicken Sie auf **Ausrichtung anpassen** , wählen Sie das Objekt aus, an dem Sie den Gesichtsscan ausrichten möchten, und klicken Sie auf **OK**. Mit dem Assistenten können Sie mindestens fünf korrespondierende Punkte angeben, um den Scan und das Modell korrekt auszurichten. Klicken Sie auf **Fertig**, um den Assistenten für die korrespondierenden Punkte zu beenden.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, um den **Gesichtsscan**-Assistenten zu beenden.

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um einen weiteren Gesichtsscan hinzuzufügen.

Trimmen eines Gesichtsscans

Es empfiehlt sich, die Zähne, die auf einem lächelnden Scan zu sehen sind, wegzuschneiden, damit Sie das Patientenmodell z. B. mit dem SmartSetup™ durch den Gesichtsscan anzeigen können.

1. Klicken Sie auf **Gesichtsscan trimmen** , entweder auf der Registerkarte **Prothetik** der Symbolleiste oder im **Gesichtsscan**-Assistenten.
2. Entfernen Sie den Bereich, der weggeschnitten werden soll, indem Sie darauf klicken und ziehen. Verwenden Sie ggf. den Schieberegler **Pinselgröße anpassen**.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis: Die Trimmaktion wird auf den angezeigten Gesichtsscan angewendet. Wenn mehrere Scans geladen sind und Sie einen der Gesichtsscans trimmen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst über das **Gesichtsscan**-Kontextmenü den richtigen Gesichtsscan auswählen.


SMARTSETUP™

SmartSetup™ heißt die Lösung, mit der basierend auf einem Scan der aktuellen Zahnsituation optimale virtuelle Zähne automatisch berechnet werden. Die Berechnung berücksichtigt Folgendes:

- Die Größe, Form und Position der vorhandenen Zähne
- Den Zahntyp, der designt werden muss (ein Eckzahn muss eine andere Form haben als zum Beispiel ein Prämolare)
- Die Größe und Form des gespiegelten Zahns
- Ein Set ästhetischer Regeln für Zähne im Frontbereich
- Informationen zu den Antagonisten, wenn verfügbar

Berechnen eines SmartSetup™

Um ein SmartSetup™ zu berechnen, muss ein Dentalscan mit mindestens drei Restzähnen verfügbar sein.

1. Klicken Sie auf **SmartSetup**  in der Gruppe **Zusätzliche Scans** auf der Registerkarte **Prothetik**.
2. Klicken Sie auf **SmartSetup-Einstellungen** in der unteren rechten Ecke des Zahnübersicht-Fensters und passen Sie die Einstellungen des SmartSetup™ an, um das Ergebnis des SmartSetup™ zu ändern.
3. Klicken Sie auf **Berechnen**. Das SmartSetup™ wird berechnet.


SmartSetup™ Einstellungen




Im SmartSetup™ Assistenten können Einstellungen angepasst werden, um das Ergebnis der SmartSetup™ Berechnung zu optimieren.

1. Klicken Sie auf der Seite **Überprüfen des SmartSetup™** des **SmartSetup™** Assistenten unten rechts im Zahnübersichts-Fenster auf **SmartSetup™ Optionen**, um das Dialogfeld **Einstellungen** zu öffnen.
2. Geben Sie in der Gruppe **Qualität** an, ob die Modelle mit den Qualitätsstufen **Maximum** (die Berechnung dauert sehr lange), **Optimal** oder **Gering** berechnet werden sollen. Je nach Auswahl werden mehr oder weniger Zähne in der Berechnung berücksichtigt.
 - **Maximum:** Alle gescannten Zähne werden in die Berechnung des SmartSetup™ einbezogen. Die Berechnungszeit ist länger als bei der Lösung **Optimal**.
 - **Optimal:** Es werden die für ein optimales Ergebnis benötigten Zähne berücksichtigt, die Berechnungsdauer ist nicht übermäßig lang.
 - **Gering:** Eine Mindestanzahl Zähne wird bei der Berechnung des SmartSetup™ berücksichtigt. Die Berechnungszeit ist kürzer als bei der Lösung **Optimal**.
3. In der **SmartSetup™** Gruppe können Sie festlegen, ob die virtuellen Zähne nach den folgenden Kriterien berechnet werden sollen:
 - **Remove gaps for tooth setups:** Lücken zwischen benachbarten Zähnen sollten in der Regel so gering wie möglich ausfallen. In bestimmten Situationen ist die zu füllende Lücke allerdings viel zu groß. Wenn Sie diese Option wählen, kann der virtuelle Zahn zu groß ausfallen. In diesem Fall ist es möglicherweise besser, die Option **Lücken für Zahnaufstellung entfernen** zu deaktivieren. Standardmäßig ist die Option für **alle Zähne** ausgewählt. In der Dropdown-Liste können Sie den Zahn bzw. die Zähne auswählen, bei denen die Lücken entfernt werden sollen.
 - **Auf gegenüberliegendem Zahn basierende Position (spiegeln):** Wählen Sie diese Option, wenn der SmartSetup™ genau wie der Gegenbiss positioniert werden soll. Achten Sie aber darauf, dass Patienten meist keinen vollständig symmetrischen Zahnbogen haben. Diese Funktion kann also zu einem nicht unbedingt optimalen Ergebnis führen. Diese Option ist daher standardmäßig deaktiviert. Der Anwender kann sie aktivieren und prüfen, ob dies zu einem besseren Berechnungsergebnis führen wird.
 - **Ästhetik der Frontzähne optimieren:** Diese Aktion bestimmt bzw. berechnet das beste ästhetische Ergebnis anhand eines Regelsatzes. Die Regeln beinhalten zum Beispiel, dass die Schneidekante der mittleren Schneidezähne die gleiche Höhe haben sollte und die mittleren Schneidezähne die gleiche Breite haben sollten. Dies gilt auch für seitliche Schneidezähne und Eckzähne.
 - **Dritte(n) Seitenzahn/Seitenzähne einschließen:** Diese Option ist standardmäßig ausgewählt, wenn der Scanbereich beide dritten Molare enthält. Größe, Form und Position des/der dritten Molar(e) werden bei der Berechnung der Größe, Form und Position des SmartSetup™ berücksichtigt.
 - **Zusätzliche Optimierung der Okklusion:** Wenn Informationen zum Antagonisten vorliegen, ist diese Option standardmäßig ausgewählt. Die Informationen zum Antagonisten werden für die Feineinstellung der Okklusion berücksichtigt.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen auf die Berechnung des SmartSetup™ anzuwenden. Um den Assistenten fortzusetzen, klicken Sie auf **Weiter**.

Bearbeiten eines SmartSetup™

Bearbeiten Sie die Position jedes berechneten SmartSetup™ einzelnen:

1. Klicken Sie auf **SmartSetup bearbeiten**  auf der Registerkarte **Prothetik** der Symbolleiste **Planung**. Alternativ klicken Sie auf **SmartSetup bearbeiten** auf der Seite **Ergebnis prüfen** des **SmartSetup**-Assistenten.
2. Wählen Sie das SmartSetup™, das Sie bearbeiten möchten, indem Sie es in der 3-D-Ansicht anklicken oder durch Auswählen des Zahnes im Dropdown-Feld.
3. Klicken Sie auf die Aktion **Verschiebung**, **Rotation** und/oder **Skalieren**, um Position und Größe des ausgewählten SmartSetup™ einzustellen.


	Verschiebung	<p>Klicken Sie auf das SmartSetup™, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie, um die Position des SmartSetup™ zu ändern.</p> <p>Passen Sie die Werte in den Feldern Bukkal/lingual, Mesial/distal und/oder Okklusal an, um Feineinstellungen an der Position des SmartSetup™ vorzunehmen.</p>
	Rotation	<p>Klicken Sie auf das SmartSetup™, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie, um das SmartSetup™ zu drehen.</p> <p>Passen Sie die Werte in den Feldern Bukkal/lingual, Mesial/distal und/oder Okklusal an, um Feineinstellungen an der Position des SmartSetup™ vorzunehmen.</p>
	Skalieren	<p>Klicken Sie auf das SmartSetup™, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie, um die Größe des SmartSetup™ einzustellen. Ziehen Sie nach oben, um zu vergrößern bzw. nach unten, um zu verkleinern.</p> <p>Alternativ verwenden Sie das Feld Skalierung, um einen bestimmten Prozentwert einzugeben oder um Feineinstellungen an der Größe des SmartSetup™ vorzunehmen.</p>

Um die Änderungen für das ausgewählte SmartSetup™ rückgängig zu machen, klicken Sie auf  **Zahn zurücksetzen**.

MODELL DER RÖNTGENSCHABLONE


Basierend auf der klinischen Patientendiagnose wird aus einer klinisch validierten Zahnaufstellung eine Röntgenschablone erstellt, welche Markierungen (Markers) für das Doppel-Scan-Verfahren enthält. Das virtuelle Modell wird nach dem Konvertieren des Patientenmodells erstellt.

So erstellen Sie das Modell der Röntgenschablone:

1. Rufen Sie den Assistenten zum Erstellen von Schablonen (Create Guide Wizard) über die Schaltfläche **Schablone**  auf.
2. Wählen Sie die richtigen DICOM-Daten aus und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Stellen Sie das gewünschte Volumen ein.
4. Bei Verwendung des passenden Kalibrierungssets wird der **kalibrierte Isowert** geladen. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Überprüfen Sie das Modell der Röntgenschablone.
6. Patientenmodell und Röntgenschablone werden automatisch aufeinander abgestimmt.
7. Überprüfen Sie das Ausrichtungsergebnis, und klicken Sie auf **Fertig**.

TIEFDRUCK-OBERFLÄCHE

Zum Erstellen einer Tiefdruck-Oberfläche beruhend auf der Röntgenschablone:

1. Klicken Sie auf **Tiefdruck**  auf der Registerkarte **Prothetik** der Symbolleiste **Planung**.
2. Überprüfen Sie die Tiefdruck-Oberfläche, und klicken Sie auf **Fertig**.


Diagnose

NERVEN

Zum Markieren eines Nerven klicken Sie auf der Registerkarte **Diagnose** auf **Nerv** . Der Assistent wird geöffnet.


1. Passen Sie den Nervenquerschnitt bei Bedarf an.
2. Klicken Sie, um die Konstruktionspunkte des Nerven anzugeben.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wenn Sie keine weiteren Punkte hinzufügen möchten.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.

Die Punkte werden durch eine plastische Linie verbunden, die den Nerv anzeigt.

Zum Markieren eines weiteren Nerven wählen Sie **Neuen Nerv hinzufügen**  in der Gruppe **Nervaktionen** aus. Geben Sie die Punkte des neuen Nerven mithilfe des oben beschriebenen Verfahrens an.

Tip: Wenn der Nervenkanal nicht gut sichtbar ist, passen Sie den Nervenquerschnitt an. Diese U-Form steht in keinem Zusammenhang mit der Form der Querschnittskurve.

ZÄHNE

Klicken Sie zum Markieren eines Zahns auf der Registerkarte **Diagnose** auf **Zahn** , um einen Assistenten zu öffnen.

1. Wählen Sie den zu markierenden Zahn oben im Diagramm aus.


Hinweis: Standardmäßig wird das FDI-Schema zur Zahnbezeichnung verwendet. Ändern Sie das Zahnbezeichnungsschema bei Bedarf über **Allgemeine Einstellungen**.

2. Nehmen Sie die Feineinstellung der Position des ausgewählten Zahns vor, indem Sie dessen zentrale Achse einstellen.
3. Klicken Sie auf **Magische Markierungsfüllung**  oder **Markierungspinsel** .
4. Blättern Sie durch die CT-Schichten, und klicken oder ziehen Sie, um den Zahn bitweise zu markieren. Alle Daten in einem bestimmten Bereich um die angeklickte Position werden gefärbt und dem Zahn hinzugefügt.
5. Klicken Sie auf **3-D aktualisieren**  oder verwenden Sie die Tastenkombination [u]. Der Zahn wird jetzt in einer 3-D-Vorschau angezeigt und dem Patientenmodell in der 3-D-Ansicht hinzugefügt.
6. Wählen Sie bei Bedarf einen neuen zu markierenden Zahn im Diagramm aus.
7. Wenn alle Zähne markiert wurden, klicken Sie auf **Fertig**.

ENTFERNEN VON ZÄHNEN AUS DEM MODELL


Wenn Zähne markiert sind, können sie einzeln oder gleichzeitig vom Patientenmodell entfernt werden.

Gleichzeitiges Entfernen aller Zähne

1. Klicken Sie auf **Zähne entfernen**  auf der Registerkarte **Patient**. Dieses Symbol ist nur aktiv, wenn Zähne markiert wurden.
2. Korrigieren Sie das Patientenmodell bei Bedarf mit der Aktion **Patientenmaske** oder **Knochenartefakte löschen**.

Hinweis: Wenn neue Zahnmarkierungen hinzugefügt oder Zähne nach dem Entfernen eines Zahns bearbeitet werden, führen Sie die Aktion **Zähne entfernen** erneut aus, falls diese auch auf die neu hinzugefügten oder bearbeiteten Zähne angewendet werden soll. Die Aktion wird nicht automatisch ausgeführt. Alternativ können Sie die Aktion **Zahn extrahieren** verwenden.

Einen Einzelzahn extrahieren

1. Klicken Sie auf den markierten Zahn, um diesen auszuwählen.
2. Klicken Sie auf **Zahn extrahieren**  in der Gruppe **Diagnose** in der Symbolleiste **Diagnose**. Das Symbol **Zahn extrahieren** ist nur verfügbar, wenn Zähne markiert wurden.
3. Der extrahierte Zahn wird rot markiert.

MESSUNGEN

Es sind verschiedene Messtypen verfügbar.

Tipp: Wenn Objekte den Text der Messergebnisse verdecken, wählen Sie das entsprechende Objekt oder dessen Text aus, damit die Messergebnisse in der Statusleiste angezeigt werden.

Abstand zwischen 2 Punkten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Abstand  auf der Registerkarte Diagnose. 2. Klicken Sie, um den ersten Punkt zu kennzeichnen, und erneut, um den zweiten Punkt zu kennzeichnen. Die Messung wird angezeigt.
Winkel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Winkel  auf der Registerkarte Diagnose. 2. Geben Sie die drei Punkte a, b und c an. 3. Der Winkel wird mittels eines Winkelbogens angezeigt, und der Messwert wird angegeben.
Grauwert/Hounsfield-Einheiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf HU-Wert  auf der Registerkarte Diagnose. 2. Geben Sie einen Punkt an, um den HU-Wert dort zu messen.
Winkel zwischen Implantaten oder Abutments	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie ein Implantat aus und klicken Sie auf Implantatwinkel  auf der Registerkarte Diagnose. 2. Wählen Sie das zweite Implantat aus. Eine gebogene gelbe Linie zeigt die Messung zusammen mit dem Wert an.

Implantate planen

ARBEITEN MIT IMPLANTATEN, DIE NICHT VON NOBEL BIOCARE SIND

In DTX Studio™ Implant können auch Implantatsysteme, die nicht von Nobel Biocare sind, verwendet werden (z. B. Straumann Zahnimplantate, Dentsply Zahnimplantate, Camlog Zahnimplantate usw.). Der Anwender kann auf der Registerkarte **Implantatprodukte** des Dialogs **Einstellungen** die Implantatsysteme angeben, die DTX Studio™ Implant hinzugefügt werden sollen.

Hinweis: Um Implantatsysteme, die nicht von Nobel Biocare sind, in DTX Studio™ Implant herunterzuladen, ist eine Internetverbindung erforderlich.

Um Implantatsysteme in DTX Studio™ Implant hinzuzufügen oder zu entfernen, müssen alle Planungsszenarien geschlossen sein. Schließen Sie deshalb sämtliche Patientendateien, und wechseln Sie zum Dialogfeld **Einstellungen**:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **DTX Studio Implant**.
2. Wählen Sie die Option **Allgemeine Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Installierte Produkte**.
4. Geben Sie an, welche Implantatsysteme zur Software hinzugefügt oder daraus entfernt werden sollen.
5. Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Bei der Verwendung von Produkten, die nicht in der Software verfügbar sind, werden diese im Behandlungsplan als zylinderförmige Platzhalter dargestellt. Die ursprünglichen Produktdaten werden jedoch gespeichert. Sobald das Produkt in der Software verfügbar ist, werden die Platzhalter im Behandlungsplan durch eine detailgetreuere Darstellung ersetzt.




Achtung: Wenn Warnungen aufgrund der Zylinderformen ausgelöst werden, sind diese Warnungen auf der Basis der geschätzten Produktform berechnet worden.

HINZUFÜGEN EINES IMPLANTATS ZU EINEM BEHANDLUNGSPLAN

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Planung eines Implantats beschrieben. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass dem Anwender die quantitativen und qualitativen Einschränkungen in Bezug auf die Planung eines Zahnimplantats bekannt sind.

Um dem Behandlungsplan ein Implantat hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Klicken Sie auf **Implantat**  auf der Registerkarte **Plan**.
2. Klicken Sie zum Positionieren des Implantatschulterpunkts auf das Patientenmodell.
3. Klicken Sie zum Positionieren der Spitze des Implantats auf das Modell.
4. Wählen Sie im Fenster **Produktauswahl** unter **Hersteller** den korrekten Hersteller aus.
5. Wählen Sie ein Implantat aus. Geben Sie optional auch die Art des Eingriffs und ein kompatibles Abutment an, und überprüfen Sie die Zahnposition.
6. Klicken Sie auf **Produkt auswählen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Achtung: Nicht verfügbare Produkte werden im Fenster **Produktauswahl** mit einer roten Warnung und in der 3-D-Ansicht blau angezeigt. Das Bestellen dieser Produkte ist nicht möglich.

Bedeutung der gelben Zone

Die übliche Toleranz des NobelGuide Konzepts liegt bei 1,5mm. Die halbtransparente gelbe Zone ermöglicht es dem Anwender, diesen Aspekt in Relation zu wichtigen Strukturen besser zu erkennen. Die Zone ist ein Zylinder mit einem Radius, der den des eigentlichen Implantats um 1,5mm überschreitet. Außerdem schließt sie einen 3mm hohen Kegel ein.

Wenn die gelbe Zone durch die äußere Knochenoberfläche sichtbar ist, wird der Anwender auf ein eventuelles Risiko während der Operation hingewiesen.

Hinweise:

- Die Bohrer sind 1mm länger als die geplanten Implantate. Die gelbe Warnzone berücksichtigt diese Varianz.
- Es wird empfohlen, mindestens 3mm des vitalen Knochens zwischen zwei Implantat-Knochen-Übergängen und einen Mindestabstand von 1,5mm zwischen Zahn und Implantat zu planen, um eine zelluläre Rekolonisation mit ordnungsgemäßer Blutzufuhr zu gewährleisten.
- Das NobelGuide Konzept umfasst mehrere klinische Schritte, die der Arzt patientenspezifisch beachten muss. Für jeden einzelnen Fall muss daher der Einfluss dieser Vorgänge berücksichtigt werden.

Zahnposition

Implantate werden einer bestimmten Zahnnummer zugewiesen. Diese Zahnnummer wird an verschiedenen Orten in der Software angezeigt, z. B. im **Eigenschaftenfenster** eines Implantats, der zugehörigen Registerkarte „Implant“, dem Kontextmenü eines Implantats und in der Statusleiste nach Auswahl des Implantats.

Zahnübersicht

Mit der Zahnübersicht kann die geschätzte Position des Zahns, der das Implantat zugewiesen ist, vom Anwender überprüft und ggf. angepasst werden. Die in dieser Zahnübersicht verwendete Konvention zur Zahnnummerierung entspricht den unter den allgemeinen Einstellungen festgelegten Angaben.



Die Position ? (Position mit dem Fragezeichen) wird für unbekannte oder nicht eindeutige Zahnpositionen verwendet (zum Beispiel wenn ein Implantat zwischen zwei Positionen geplant ist, für die auch schon andere Implantate geplant sind).

BEARBEITEN EINES IMPLANTATS

DTX Studio™ Implant bietet verschiedene Funktionen für eine optimale Planung der Implantatposition.

Ändern der Implantatausrichtung

Die Ausrichtung eines Implantats kann durch Verschieben der kreisförmigen Bereiche angepasst werden.

1. Wählen Sie das Implantat aus. Die Kugeln ändern ihre Farbe und werden rot.
2. Führen Sie dazu einen oder mehrere der folgenden Schritte durch:
 - Klicken Sie auf den oberen Punkt des Implantats, und ziehen Sie ihn, um eine Drehbewegung auszuführen. Der Spitzenpunkt fungiert dabei als Rotationspunkt.
 - Klicken Sie auf den unteren kreisförmigen Bereich auf dem Implantat, und ziehen Sie ihn, um eine Drehbewegung auszuführen. Der Schulterpunkt des Implantats dient dabei als Rotationspunkt.

Verschieben eines Implantats

Die Position des Implantats ändert man wie folgt:


1. Wählen Sie ein Implantat aus. Das graue Rechteck am Implantat wird grün.
2. Klicken Sie auf das grüne Rechteck, und ziehen Sie das Implantat an die gewünschte Position. Das Implantat behält seine ursprüngliche Ausrichtung (Neigung) bei.

Die Tiefe und Rotation können auch über die Symbole auf der entsprechenden Symbolleiste **Implantat** geändert werden.

Paralleles Ausrichten von Implantaten


Parallele Implantate platzieren

So richten Sie ein einzelnes neues Implantat mit einem ausgewählten Implantat parallel aus:

1. Wählen Sie das Implantat aus, welches als Referenz dienen soll.
2. Klicken Sie auf **Paralleles Implantat** .
3. Klicken Sie in der 3-D- oder 2-D-Ansicht, um den Schulterpunkt des Implantats anzugeben.
4. Das neue Implantat wird parallel zum ausgewählten Implantat positioniert.

Parallele Implantate platzieren


So platzieren Sie alle im Plan verfügbaren Implantate parallel:


1. Wählen Sie das Implantat aus, welches als Referenz dienen soll.
2. Klicken Sie auf **Alle parallel ausrichten** .
3. Alle Implantate werden am anfänglich ausgewählten Implantat parallel ausgerichtet.

Hinweis: Überprüfen Sie nach Ausführung des Befehls **Alle parallel ausrichten** sorgfältig alle Implantatpositionen. Wenn das Ergebnis klinisch nicht akzeptabel ist, verwenden Sie die Funktion **Rückgängig machen**.

ABUTMENTS

So wählen Sie ein geeignetes Abutment für ein Implantat aus:

1. Wählen Sie im Fall das Implantat aus.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Implantat“ auf **Abutment**  oder rechtsklicken Sie auf das ausgewählte Implantat, und wählen Sie **Abutment hinzufügen** aus dem Kontextmenü aus.
3. Das Fenster **Produktauswahl** wird geöffnet, und es werden darin die kompatiblen Abutments angezeigt.
4. Standardmäßig ist die Einstellung **Kein Abutment** ausgewählt. Wählen Sie ein Abutment aus. Achten Sie dabei auf die richtigen Abmessungen.
5. Klicken Sie auf **Produkt auswählen**.

Hinweis: Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn das ausgewählte Implantat noch nicht über ein Abutment verfügt. Wenn bereits ein Abutment gewählt wurde, klicken Sie auf die Menüoption **Produkt ändern** oder das Symbol , um das Fenster **Produktauswahl** anzuzeigen.

Einstellen der Art des Eingriffs

Der Behandler verfügt über verschiedene chirurgische Optionen, sogenannte Eingriffstypen, um den Patienten zu behandeln (Freihand, Verwendung einer OP-Schablone ausschließlich für die Pilotbohrung oder Verwendung einer OP-Schablone für vollständig schablonengeführte Eingriffe). Die Art des Eingriffs kann für jedes Implantat im Behandlungsplan individuell eingestellt werden.

1. Wählen Sie das Implantat aus.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Art des Eingriffs** auf der betreffenden Registerkarte der Symbolleiste. Dieses Symbol hat je nach Art des Eingriffs eine unterschiedliche Form.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingriffsart aus der Liste aus. Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom ausgewählten Implantattyp.

Hinweise:

- Beim Platzieren eines neuen Implantats kann die Eingriffsart einfach über die Registerkarte **Art des Eingriffs** im Fenster **Produktauswahl** eingestellt werden.



- Beim Erstellen einer OP-Schablone kann die Art des Eingriffs einfach über das Fenster **Chirurgieeinstellungen prüfen** angepasst werden.

Unterschiedliche Eingriffstypen

Je nach den im Behandlungsplan ausgewählten Produkten sind unterschiedliche chirurgische Optionen möglich. Die folgenden Eingriffstypen sind verfügbar:



Freihand: Zur Insertion dieses Implantats wird keine OP-Schablone (Führungshülse) verwendet.



Vollständig geführt: Es wird eine OP-Schablone mit Führungshülse (zum geführten Bohren und zur geführten Implantatinserterion) verwendet, um die geplante(n) Implantatposition(en) auf den Mund des Patienten zu übertragen.



Pilotbohren (nur für NobelGuide Spiralbohrer 1,5 mm und 2,0 mm): Die geplanten Implantatpositionen werden mit einer OP-Schablone mit Pilothülse (nur für geführte Pilotbohrungen) auf den Mund des Patienten übertragen. Nach Verwendung des Pilotbohrers wird die OP-Schablone entfernt, die geführte Bohrtiefe mit dem Richtungsindikator oder dem Freihand-Spiralbohrer in Bezug auf eine anatomische Gegebenheit (z. B. Knochenkamm) erfasst und das Freihandbohren begonnen. Danach erfolgt die Freihand-Implantatinserterion (alle Tiefen der Freihandwerkzeuge hängen von der nach dem Entfernen der Schablone festgelegten anatomischen Gegebenheit ab). Je nach Implantatdurchmesser kann ein abweichender Pilothülsendurchmesser ausgewählt werden.

Versatz der Pilothülse

Diese Funktion ist nur für die Pilotbohrung bestimmt. Bei bestimmten klinischen Indikationen reicht der normale Abstand zwischen dem geplanten Implantat (der Implantatschulter) und der Hülse nicht aus (z. B. wenn das Implantat tiefer platziert werden muss, bei schmalen Kieferkämme, wenn ein Entfernen nach der Implantatinserterion erforderlich ist, bei Kollision der Hülse mit den Nachbarzähnen usw.). Bei diesen Indikationen kollidiert die Hülse an der Standardposition mit dem Oberflächenscan des Dentalscans, was zu einer Warnung für Pilothülsen führt. Um eine OP-Schablone ohne Hülsenkollisionen zu erstellen und das Implantat an der geplanten klinischen Position zu belassen, kann die Hülse nach oben verschoben werden. Das Standardverhältnis von Führungshülsen und geplanten Implantaten wird durch die Tiefenmarkierungen aller NobelGuide Führungsbohrer für alle Bohrprotokolle angegeben. Der zusätzliche Abstand wird als „Hülsen-Offset“ bezeichnet, automatisch erfasst und auf der Seite „NobelGuide chirurgische Anweisungen“ hinzugefügt, die der OP-Schablone beige-fügt ist.

1. Wählen Sie ein Implantat aus.
2. Stellen Sie sicher, dass die Art des Eingriffs für das ausgewählte Implantat **Pilotbohrung** lautet.
3. Auf der entsprechenden Registerkarte **Implantat** auf das Symbol **Hülsen-Offset** neben dem Symbol **Art des Eingriffs** klicken. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Implantat und wählen Sie **Hülsen-Offset** aus dem Popup-Menü aus.
4. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Hülse in der Höhe neu zu positionieren, oder geben Sie die Versatzhöhe direkt in das Feld des Schiebereglers ein.


Rotation der Pilothülse

Wenn sich die Hülsen nicht in der korrekten Rotationsposition befinden, können die Hülsen gedreht werden.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Implantat.
2. Klicken Sie im Popup-Menü auf die Option **Rotation der Hülse**.
3. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Hülse zu drehen, bis die korrekte Rotationsposition erreicht ist.

KNOCHENSCHNITTEBENE

Um eine Ebene anzugeben, die das ideale Knochenniveau für den Patienten darstellt, verwenden Sie die Aktion **Knochenschnittebene**. Nichts wird tatsächlich entfernt. Es wird lediglich visualisiert, wo der Knochen ggf. entfernt werden muss. Dies hilft Ihnen beim Planen der Behandlung.

1. Klicken Sie auf **Knochenschnittebene**  in der Gruppe **Planen** auf der Registerkarte **Planen** der Symbolleiste.

2. Dem Patientenmodell wird eine violette Ebene hinzugefügt.

Klicken Sie auf die Ebene, um sie auszuwählen. Ziehen Sie die farbigen Punkte an die Grenzen, um die Ebenengröße und -position anzupassen. Verwenden Sie den Schieberegler **Ebenenhöhe** im Kontextmenü, um die Position der Ebene in Bezug auf die Z-Achse des Modells anzupassen.

VERANKERUNGSSTIFTE


Um zu Beginn des chirurgischen Eingriffs eine entsprechende Fixierung zu erhalten, werden für die OP-Schablone Verankerungsschrauben verwendet. Beim Planen der Verankerungsschrauben sind Ausrichtung und Tiefe äußerst wichtig. Bei zahnlosen Kiefern werden in der Regel drei bis vier Verankerungsschrauben platziert. Die Verankerungsschrauben müssen in Bereichen mit ausreichend kortikalem Knochen positioniert werden. Um das Risiko von Gewebeverletzungen zu minimieren, muss eine bikortikale Verankerung der Schrauben vermieden werden.

Hinweise:

- Position und Ausrichtung des Verankerungsschraubs müssen eine einfache Befestigung (unter Berücksichtigung von Lippenretraktion und Mundöffnung) ermöglichen sowie kritische Strukturen wie Blutgefäße meiden.
- Um die OP-Schablone präzise im Mund des Patienten zu positionieren, sollte ein Bissregistrator verwendet werden. Das Bissregistrator muss ausreichend Zugang für Bohrvorgänge und die Platzierung von Verankerungsschrauben bieten. Nach Installation der Verankerungsschrauben kann das Bissregistrator entfernt werden.

Verankerungsschrauben zum Behandlungsplan

Das Positionieren eines Verankerungsschraubs erfolgt ähnlich wie das Einsetzen eines Implantats.

3. Klicken Sie auf **Verankerungsschraube** .
4. Klicken Sie, um die Position des Verankerungsschraubs anzugeben.
5. Klicken Sie, um die Spitze des Verankerungsschraubs anzugeben.
6. Der Verankerungsschraube wird im Fall platziert.

Tipp: Es ist praktischer, den Schulter- und Spitzenpunkt in einer geeigneten 2-D-Ansicht festzulegen.

Korrekte Neigung und Tiefe von Verankerungsschrauben


Um die OP-Schablone für die Implantatinserterion zu stabilisieren, können Verankerungsschrauben an strategischen Positionen platziert werden. Ihre Ausrichtung und Tiefe sind entscheidend.

Die Verankerungsschrauben können während des Eingriffs zudem als Lippenretraktoren verwendet werden. Wenn die Verankerungsschrauben im Zahnbogen zu weit vorstehen, kann die Mundöffnung dadurch beeinträchtigt werden. Um diese mögliche negative Auswirkung abzumildern, ist eine Ausführung des Verankerungsschraubs mit kurzem Schaft erhältlich. Auf jeden Fall sollten die Verankerungsschrauben so geplant werden, dass sie den Zugang erleichtern und die Implantatpositionen nicht behindern.


Die Hülsen sollten nahe der Mukosa platziert werden (in einem Abstand von 0,5 bis 1 mm von der Mukosa), die auf dem digitalisierten Oberflächenmodell der intraoralen Situation dargestellt ist, dürfen jedoch bei Verwendung eines mit der Smart Fusion ausgerichteten Oberflächenscans nicht mit dem oben genannten Modell kollidieren. Bei einem zahnlosen Kiefer wird die Verwendung von mindestens vier Verankerungsschrauben empfohlen. Die Verankerungsschraubenhülsen werden aus extraoraler Richtung in den Mundvorhof eingeführt, oder in seltenen Fällen aus der gegenüberliegenden Richtung (palatinal oder lingual), um die OP-Schablone von zwei Seiten aus zu fixieren.

Verankerungstifte und Röntgenschablone (Arbeitsablauf bei zahnlosem Kiefer)

Bei Verwendung einer Röntgenschablone muss die Hülse mit der Schablone verbunden werden, darf jedoch nicht aus der Tiefdruck-Oberfläche herausragen.

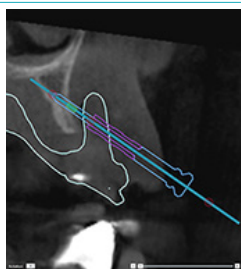


Richtig

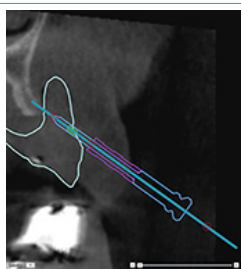

Falsch

Die Hülse des Verankerungstifts ist nicht mit der Röntgenschablone verbunden; eine Verbindung mit der Schablone ist nicht möglich.


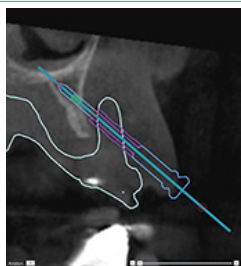


Falsch


Die Hülse des Verankerungstifts ragt aus der Röntgenschablone heraus; die Passung der Schablone im Mund des Patienten ist nicht möglich.

Verankerungstifte und Dentalscan (Arbeitsablauf bei teilbezahntem Kiefer)


Bei Verwendung eines mit der SmartFusion ausgerichteten Oberflächenscans muss die Hülse nahe der Mukosa platziert werden (in einem Abstand von 0,5 mm bis 1 mm von der Mukosa, dargestellt im Oberflächenscan). Die Hülse darf jedoch nicht aus dem mit der SmartFusion ausgerichteten Oberflächenscan herausragen.

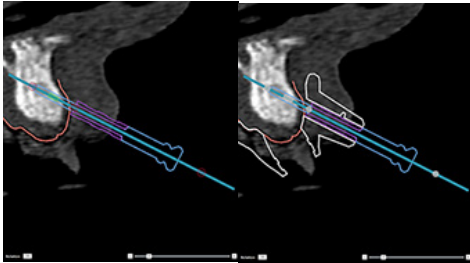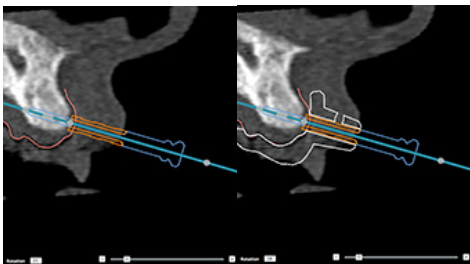**Richtig****Falsch**

Die Hülse des Verankerungstifts ragt aus dem Dentalscan heraus (Weichgewebe); die Passung der Schablone im Mund des Patienten ist nicht möglich.

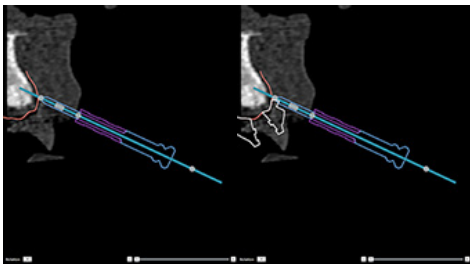**Falsch**

Der Verankerungstift ist nicht im Knochen verankert und nicht mit dem Dentalscan verbunden. Es wird kein Schablonenmaterial in die Region um die Hülse hinzugefügt.

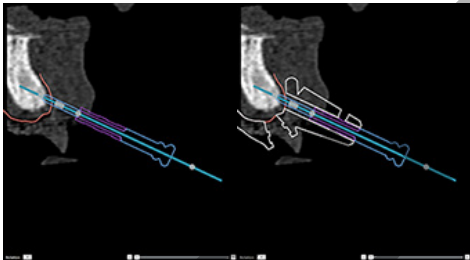**Falsch**

Der Verankerungstift ist nicht im Knochen verankert; es wird Schablonenmaterial in die Region um die Hülse hinzugefügt, dieser Verankerungstift bietet jedoch keinen Halt während des Eingriffs.

Prüfen eines Behandlungsplans

Für die Überprüfung des Wegs eines Implantats oder Verankerungsstifts durch den Knochen ist es möglich, Schichten durch die Aufnahme an einem Implantat oder Verankerungsstift entlang und parallel zu diesem Implantat oder Verankerungsstift anzuzeigen. Diese Funktion erlaubt eine detaillierte Überprüfung der Knochenumgebung von Implantaten und Verankerungsstiften. Dadurch wird sichergestellt, dass die gewählte Position für das Einsetzen von Implantaten oder Verankerungsstiften geeignet ist.

ARBEITEN MIT DER SNAP-FUNKTION

Die Snap-Funktion des 3-D-Schnitts verfügt über verschiedene Modi:

- Im Modus **Implantat oder Verankerungsstift** wird der 3-D-Schnitt in der Mitte der Hauptachse eines Implantats oder Verankerungsstifts positioniert.
- Im Modus **„Kurve“** wird der 3-D-Schnitt an die Kurve der Panorama-Ansicht andockt.

So docken Sie die Querschnittsansicht an ein Implantat oder einen Verankerungsstift an:

1. Klicken Sie auf **Querschnitt andocken**  im Fenster **Werkzeuge**.
2. Der 3-D-Schnitt wird mit dem ausgewählten Implantat verbunden und dreht sich um dieses, anstatt dem Kieferknochenbogen zu folgen. Wenn kein Implantat oder Verankerungsstift ausgewählt ist, wird der Schnitt automatisch am zuletzt ausgewählten Implantat oder Verankerungsstift positioniert. Wenn noch kein Implantat oder Verankerungsstift ausgewählt wurde, wird der Schnitt automatisch am zuletzt geplanten Implantat oder Verankerungsstift positioniert.

Tipp: Bei Auswahl eines anderen Implantats oder Verankerungsstifts wird der Schnitt automatisch an dieses Objekt andockt. Diese Funktion kann in den allgemeinen Einstellungen deaktiviert werden.

Hinweis: Wenn das letzte Implantat in der Planung gelöscht wird, wird der 3-D-Schnitt automatisch an die Schnittkurve andockt, wenn er an das Implantat andockt war.

SPRINGEN ZU ANDEREM IMPLANTAT ODER VERANKERUNGSSTIFT


Wenn sich die Snap-Funktion im Implantat- oder Verankerungsstiftmodus befindet, können Sie mit der Aktion **Weiter** in der **Snap**-Leiste der 2-D-Ansicht zu einem anderen Implantat oder Verankerungsstift wechseln.

1. Klicken Sie in der Snap-Leiste auf **Weiter**.
2. Der 3-D-Schnitt wechselt nun zum nächsten Implantat oder Verankerungsstift in der Reihe.

ZURÜCKKEHREN IN DEN KURVENMODUS

Wenn sich die Snap-Funktion im Implantat- oder Verankerungsstiftmodus befindet, können Sie mit der Aktion **Einrasten aufheben** in der **Snap**-Leiste schnell zum Kurvenmodus zurückkehren.

1. Klicken Sie in der Snap-Leiste auf **Einrasten aufheben**.
2. Die Querschnittsansicht wird an die Kurve andockt.

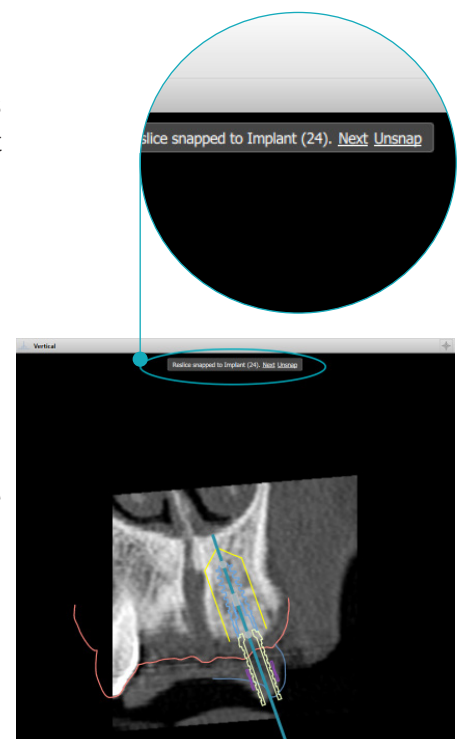


Fertigstellen

ERSTELLEN EINER OP-SCHABLONE

Die OP-Schablone unterstützt Sie dabei, die Operation genau wie geplant durchzuführen. Nach dem Fertigstellen des Behandlungsplans können Sie eine virtuelle OP-Schablone erstellen, welche eine Vorschau auf die definitive OP-Schablone ermöglicht.


So erstellen Sie eine OP-Schablone gemäß dem Behandlungsplan:

1. Klicken Sie auf **Schablone erstellen**  auf der Registerkarte **Fertig stellen**. Ein Fenster wird geöffnet, in dem die Implantatpositionen und die ausgewählten Hülsen (Eingriffstypen) überprüft werden können. Die OP-Schablone wird standardmäßig von Nobel Biocare zentral gefertigt. Wenn Sie eine Schablone vor Ort oder von einem anderen Hersteller erstellen lassen möchten, wählen Sie **Sonstige** aus. Wählen Sie den Hersteller in der Liste aus. Wenn Sie Ihren Kontonamen auswählen, können Sie die Schablone selbst aus DTX Studio™ Go herunterladen. Wenn Sie einen Ihrer Kontakte auswählen, steht denjenigen die Schablone zum Download zur Verfügung. Fügen Sie die notwendigen Details hinzu und ändern Sie bei Bedarf den gewählten Eingriffstyp.
2. Wenn die Angaben korrekt sind, klicken Sie **Weiter** an. Die virtuelle OP-Schablone wird erstellt.
3. Prüfen Sie die virtuelle OP-Schablone.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.
5. Das Dialogfeld **Planung für Bestellung bestätigen** wird angezeigt. Lesen Sie ihn sorgfältig durch. Klicken Sie auf **Ich habe das Vorstehende gelesen und stimme diesem zu**, um zu bestätigen, dass Sie die Meldung gelesen haben und dass alles so ist, wie es sein sollte.
6. Klicken Sie auf **Bestellung erstellen**, um die Schablone sofort zu bestellen. Sie werden zum Bestellmodul weitergeleitet, in dem Sie die Planungsdatei ansehen und Produkte bestellen können. Wenn Sie Ihre Bestellung auf später verschieben möchten, klicken Sie auf **Später bestätigen**.

Hinweis: Eine virtuelle OP-Schablone für die lokale Produktion hat eine andere Farbe als eine virtuelle OP-Schablone, die von Nobel Biocare hergestellt werden soll.



Virtuelle Schablone, berechnet für die Herstellung durch Nobel Biocare.

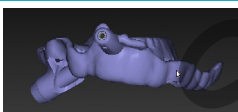

Virtuelle Schablone, berechnet für die lokale Herstellung.

Überprüfen der OP-Schablone


Bei der Fertigstellung eines Behandlungsplans gilt es insbesondere auf eine Reihe von Problemen zu achten, die die korrekte Erstellung der OP-Schablone verhindern könnten.

1. Prüfen Sie die Position der Verankerungsstifte.
2. Prüfen Sie die Ausrichtung zwischen den Implantaten, und – falls Sie Zweifel haben – besprechen Sie im Team, ob diese die prothetische Versorgung nicht beeinträchtigen könnte.
3. Prüfen Sie die Führungshülsen der Implantate in Bezug auf die benachbarten Zähne.
 - Achten Sie darauf, dass die Führungshülse die benachbarten Zähne nicht berührt.
 - Prüfen Sie in der 3-D-Ansicht, ob die OP-Schablone die angrenzenden Zähne berührt und ggf. ein Beschleifen oder eine Modifizierung der Schablone erforderlich ist.
4. Prüfen Sie jedes Implantat im senkrechten Querschnitt und im 3-D-Fall, um die Planung zu verifizieren.
5. Stellen Sie sicher, dass die Stützstrukturen der OP-Schablone, die die Hülsen der Implantate oder Verankerungsstifte umgeben, keine Risse oder Löcher aufweisen.
6. Besprechen Sie den Plan mit dem Team, um alle chirurgischen und prothetischen Aspekte zu beleuchten.

Bearbeiten der virtuellen OP-Schablone

Hinweis: Dies ist nur für anhand eines Dentalscans erstellte Schablonen möglich.

Wenn die virtuelle Schablone nicht korrekt über den Zahnbogen verteilt ist (nicht gleichmäßig über die labialen/bukkalen und lingualen Flächen verläuft), kann ihre Form bearbeitet werden. Ändern Sie im Assistenten **Schablone bearbeiten** die Form der blauen Linie, bis die Kurve mit dem Zahnbogen übereinstimmt.

1. Klicken Sie auf **Schablone bearbeiten**  auf der Registerkarte **Fertig stellen**.
2. Klicken und ziehen Sie die Punkte auf der Kurve, um deren Position zu ändern.
3. Wenn die Position der blauen Linie besser mit dem Zahnbogen übereinstimmt, klicken Sie auf **Fertig**.
4. Die virtuelle OP-Schablone wird neu erstellt.

Falls die Form der virtuellen Schablone noch immer nicht optimal ist, wiederholen Sie diesen Schritt, bis sie es ist.

Hinweis: In den USA und bestimmten anderen Ländern ist die physische OP-Schablone für enossale Implantatinsertion ein Medizinprodukt. Bitte wenden Sie sich an die zuständige Regulierungsbehörde, um weitere Informationen über den Regulierungsstatus und die Anforderungen an die Herstellung dieser OP-Schablone zu erhalten.

BESTÄTIGEN EINES BEHANDLUNGSPLANS

Wenn eine Behandlung komplett fertig gestellt ist, sperren Sie sie, indem Sie sie bestätigen. Lesen Sie den Text im Dialogfeld **Bestätigen** sorgfältig durch, und stimmen Sie zu, um den Bestätigungsvorgang fortzusetzen. Der Status „Bestätigt“ wird in der Planungsstatusleiste angezeigt.

Ein bestätigter Behandlungsplan kann nicht geändert werden. Um die Bestätigung zurückzunehmen und weitere Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Planungsbestätigung zurücknehmen**.

Bestellungen


Senden Sie Scan- oder TempShell-Bestellungen an das Dentallabor, um einen Scan durchzuführen oder um ein TempShell-Provisorium zu berechnen. Um die Bestellungen über den Cloud-Service zu versenden, muss das Dentallabor DTX Studio™ Lab verwenden. Darüber hinaus muss eine Verbindung in DTX Studio™ Lab und DTX Studio™ Implant hergestellt werden.

ARBEITEN MIT VERBINDUNGEN

Um eine Verbindung hinzuzufügen, benötigen Sie die neunstellige ID-Nummer der Person, der Praxis oder des Dentallabors, mit der/dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. In DTX Studio™ Implant wird das Verbindungstoken im Dialogfeld **Kontoverwaltung** angezeigt. In DTX Studio™ Lab wird das Verbindungstoken im Dialogfeld **Kontodetails** angezeigt.


Hinzufügen einer Verbindung

So fügen Sie eine Verbindung hinzu:

1. Klicken Sie auf **Verbindung hinzufügen**  in der Registerkarte **Medizinische Datensätze** in der **My Office**-Symbolleiste. Klicken Sie alternativ auf die Registerkarte **DTX Studio Implant** und wählen Sie **Kontoverwaltung**.
2. Klicken Sie im Dialogfeld **Kontoverwaltung** auf **Neue Verbindung hinzufügen** in der Gruppe **Verbindungen verwalten**.
3. Geben Sie die neunstellige ID-Nummer des Kontos, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ein.
4. Klicken Sie auf **Verbindung hinzufügen**. Die neue Verbindung wird der Liste mit dem Status **Einladung gesendet** hinzugefügt und eine Einladung wird an die mit dem verwendeten Konto verbundene Adresse per E-Mail versendet.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Sobald Ihre Einladung angenommen wurde, erhalten Sie eine E-Mail, und der Verbindungsstatus in der Liste ändert sich in **Akzeptiert**.

Annehmen einer Verbindung

Neue Verbindungsanfragen, die Sie erhalten, haben den Status **Angefordert**. Um eine Verbindungsanfrage anzunehmen, klicken Sie auf **Akzeptieren** in der Einladungs-E-Mail. Alternative:

1. Klicken Sie auf **Verbindung hinzufügen**  in der Registerkarte **Medizinische Datensätze** der Symbolleiste **My Office** oder klicken Sie auf die Registerkarte **DTX Studio Implant** und dann auf **Kontoverwaltung**.
2. Wählen Sie im Dialogfeld **Kontoverwaltung** die Verbindungsanfrage in der Gruppe **Verbindungen verwalten** aus, die mit dem Status **Einladung gesendet** gekennzeichnet ist.
3. Klicken Sie auf **Ausgewählte Verbindung akzeptieren**.
4. Der Verbindungsstatus ändert sich in **Akzeptiert**, und eine Bestätigungs-E-Mail wird an den Einladenden versendet.


ARBEITEN MIT BESTELLUNGEN

Produktbestellungen


Erstellen von Produktbestellungen

Für Nobel Biocare Produkte kann eine Produktbestellung erstellt werden. Für Produkte, die nicht von Nobel Biocare sind (z. B. Implantate, die nicht von Nobel Biocare sind), kann keine Produktbestellung erstellt werden.

So erstellen Sie eine Produktbestellung:

1. Klicken Sie auf **Bestellung**  in der Registerkarte **Fertigstellen** der Symbolleiste **Planung**. Alternativ klicken Sie auf **Produkt** in der Modulsymbolleiste **Bestellung**.


2. Es wird eine Liste der für den aktuellen Patienten verfügbaren Planungsdateien angezeigt. Überprüfen Sie im rechten Fensterbereich die Details der ausgewählten Planungsdatei. Wählen Sie die gewünschte Planungsdatei aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der zu bestellenden Datei um eine genehmigte  handelt. Nur genehmigte Planungsdateien können in Bestellungen konvertiert werden. Bei einer noch nicht bestätigten Planungsdatei wird eine Warnung ausgegeben.

3. Die **Produktliste** wird angezeigt. Deaktivieren Sie die Elemente in der Liste, die nicht bestellt werden sollen, oder passen Sie die Bestellmenge an, und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die **Versand**-Adresse, füllen Sie aus, wer den Auftrag erteilt hat, und geben Sie ggf. Hinweise für die Fertigung ein.
5. Wählen Sie **Nur speichern** für die Bestellung oder **Speichern und jetzt senden**.
6. Prüfen Sie die zu bestellenden Produkte im Fenster **Bestellte Produkte**.
7. Klicken Sie auf **Fertig**. Die Bestellung wird erstellt und in der Liste der erstellten Bestellungen angezeigt.

Senden einer Produktbestellung



So senden Sie eine erstellte Produktbestellung:

1. Wählen Sie die erstellte Bestellung aus der Liste aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf  **Senden**.

Modellscan-Bestellungen

Um einen Oberflächenscan des Gipsmodells, eine diagnostische Zahnaufstellung oder ein Wax-up und/oder einen Antagonisten-Scan zu erhalten, senden Sie eine Modellscan-Bestellung an das Dentallabor.

Erstellen von Modellscan-Bestellungen

1. Klicken Sie im **Office**-Modul auf **Neu**  und dann auf **Modellscan bestellen** . Gehen Sie zum **Bestellmodul** und klicken Sie auf **Scan**.
2. Geben Sie die Scanobjekte in der Zahnübersicht an, indem Sie den zu scannenden Bereich ziehen und die erforderliche Option aus dem Popup-Menü auswählen. Die angeforderten Scans werden in der Liste auf der rechten Seite angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie das verbundene Dentallabor aus, das das Gipsmodell für Sie scannen wird. Geben Sie alle notwendigen Details an sowie spezielle Anweisungen an, die erforderlich sind, und prüfen Sie die Liste der angeforderten Scans.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.
6. Der Modellscan-Auftrag wird an das Dentallabor gesendet und der Liste **Bestellungen** mit der Bestellnummer hinzugefügt, die vom Server vergeben wird.

TempShell Bestellungen

Bei einem Sofortprovisorium erhält der Patient bei einer Implantatinserterion eine provisorische Krone oder Brücke. Dafür müssen der Anwender von DTX Studio™ Implant und das Dentallabor (mit DTX Studio™ Lab) zusammenarbeiten, um eine Tempshell zu designen, die der Behandler zum Zeitpunkt des Eingriffs in ein Provisorium abändern kann.

Der TempShell Arbeitsablauf


Der DTX Studio™ Implant Anwender erstellt eine Patientendatei, fügt prothetische Informationen hinzu und plant die Implantate. Eine TempShell-Bestellung wird erstellt und an das Dentallabor übermittelt, das die Anfrage in DTX Studio™ Lab erhält. Das Dentallabor fertigt ein LabDesign in DTX Studio™ Lab an.

Optional wird das LabDesign für den DTX Studio™ Implant Anwender freigegeben. Um zu überprüfen, ob das Design zum Behandlungsplan passt, fügt der Anwender das LabDesign dem Behandlungsplan in DTX Studio™ Implant hinzu. Sollten Anpassungen erforderlich sein, wird das Dentallabor kontaktiert (telefonisch oder über E-Mail), um die Anpassungen zu beantragen. Der Vorgang muss möglicherweise mehrfach zwischen DTX Studio™ Implant Anwender und Dentallabor wiederholt werden. Sobald der Behandler die Passung des Designs bestätigt hat, wird die TempShell erstellt und vom Dentallabor freigegeben.

Der DTX Studio™ Implant Anwender fügt die TempShell zum Behandlungsplan hinzu.


Erstellen einer LabDesign-Anforderung

Um ein LabDesign zu beantragen:

1. Klicken Sie auf **LabDesign**  in der Modus-Symboleiste **Bestellung**.
2. Es wird eine Liste der für den aktuellen Patienten verfügbaren Planungsdateien angezeigt. Überprüfen Sie im rechten Fensterbereich die Details der ausgewählten Planungsdatei. Wählen Sie die gewünschte Planungsdatei aus und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Die **Übersicht über die LabDesign-Beantragung** wird angezeigt.
4. Geben Sie in der Zahnübersicht die Positionen an, für die ein LabDesign (Einzelzahnimplantat oder Brücke) beantragt wurde.
5. Wählen Sie das Dentallabor, das die Beantragung ausführen wird oder exportieren Sie die Beantragung als Datei.
6. Überprüfen Sie die Details der Beantragung und passen Sie sie gegebenenfalls an.
7. Klicken Sie auf **Fertig**.


Erstellen einer TempShell-Bestellung

So erstellen Sie eine TempShell-Bestellung und versenden sie an das Dentallabor:

1. Klicken Sie auf **TempShell**  in der Modul-Symboleiste **Bestellung**.
2. Es wird eine Liste der für den aktuellen Patienten verfügbaren Planungsdateien angezeigt. Überprüfen Sie im rechten Fensterbereich die Details der ausgewählten Planungsdatei. Wählen Sie die gewünschte Planungsdatei aus und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Die **TempShell Bestellübersicht** wird angezeigt.
4. Geben Sie in der Zahnübersicht die Positionen an, für die eine TempShell (Einzelzahn oder Brücke) bestellt wurde. Wählen Sie die Extension der Flügel nicht aus.
5. Wählen Sie das Dentallabor, das die Bestellung ausführen wird oder exportieren Sie die Bestellung als Datei.
6. Überprüfen Sie die Details der Bestellung und passen Sie sie gegebenenfalls an.
7. Klicken Sie auf **Fertig**.

Hinzufügen eines LabDesign zum Behandlungsplan


Um zu überprüfen, ob die vom Dentallabor entworfene Versorgung zum Behandlungsplan passt, kann das freigegebene LabDesign dem Behandlungsplan hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie auf **LabDesign hinzufügen**  auf der Registerkarte **Prothetik** des Moduls **Planung**.
2. Das Dialogfeld **LabDesign hinzufügen** wird angezeigt. Wählen Sie **LabDesign** und klicken Sie auf **LabDesign hinzufügen**.
3. Das **LabDesign** wird der Ansicht hinzugefügt.
4. Nehmen Sie telefonisch oder über E-Mail Kontakt mit dem Dentallabor auf, um entweder zu bestätigen, dass das LabDesign passt, oder um Änderungen anzufordern.

Hinweise:

- Wenn Sie den Behandlungsplan anpassen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das LabDesign erneut bestellen.
- Wenn auf einem Datenträger eine LabDesign Datei verfügbar ist, importieren Sie diese mit der Aktion **LabDesign importieren** im Dialogfeld **LabDesign hinzufügen**.

Hinzufügen einer TempShell zum Behandlungsplan

1. Klicken Sie auf **TempShell hinzufügen**  auf der Registerkarte **Fertigstellen** der Symboleiste **Planung**.
2. Das Dialogfeld **TempShell hinzufügen** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf eine verfügbare TempShell, die dem Behandlungsplan hinzugefügt werden soll.
4. Klicken Sie auf **TempShell hinzufügen**.

Hinweis: Wenn auf einem Datenträger eine TempShell-Datei verfügbar ist, importieren Sie diese mit der Aktion **TempShell importieren** im Dialogfeld **TempShell hinzufügen**.


Serviceanforderungen

Der typische Arbeitsablauf für Serviceanforderungen über DTX Studio™ Go

Der DTX Studio™ Clinic Anwender (Anforderer) möchte von einem DTX Studio™ Implant Anwender (dem Anbieter) einen Plan für einen bestimmten Fall erhalten. Der Anforderer erstellt eine Patientendatei in DTX Studio™ Clinic und in der Regel wird eine Serviceanforderung über DTX Studio™ Go gesendet. Wenn der Anbieter eine neue Anforderung in DTX Studio™ Go erhält, einen Plan zu erstellen, kann er die notwendigen Dateien herunterladen. Die Zipdatei muss entpackt und gespeichert werden. Der Anbieter erstellt eine neue Patientendatei in DTX Studio™ Implant, dafür verwendet er die empfangenen Patientendaten. Der Anbieter führt die normalen Implantatplanungsschritte in DTX Studio™ Implant durch und genehmigt den Behandlungsplan. Dann kann der Anbieter auf die Serviceanforderung reagieren und den Behandlungsplan über DTX Studio™ Go an den Anforderer zurücksenden.

Reagieren auf eine Serviceanforderung

So senden Sie einen genehmigten Plan an den Serviceanforderer zurück:

1. Klicken Sie im Modul **Bestellen** auf **Anforderung ausfüllen** .
2. Wählen Sie den richtigen Plan aus der Liste aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Füllen Sie die angeforderten Informationen aus, um die Serviceanforderung anzupassen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Bericht sowie optional Anmerkungen oder Bilder anfügen.
4. Klicken Sie auf **Fertig**.
5. In einem Popup-Fenster werden grundlegende Informationen angezeigt, wie Service-ID und Informationen zum Anforderer. Anhand dieser Daten können Sie überprüfen, ob die Behandlung für den richtigen Patientenfall zurückgesandt wird. Klicken Sie auf **Hochladen**, um den Plan an den Anforderer zu senden.

Der „lokale“ Arbeitsablauf für Serviceanforderungen


Wenn der Anwender DTX Studio™ Clinic und DTX Studio™ Implant auf einem einzigen Computer installiert hat, unterscheidet sich der Arbeitsablauf geringfügig. In DTX Studio™ Clinic wird eine Patientendatei erstellt und es werden die erforderlichen Ausrichtungen vorgenommen, um ein Patientenmodell zu erstellen. Wenn DTX Studio™ Implant in DTX Studio™ Clinic geöffnet wird, wird das Patientenmodell exportiert und auf Grundlage der exportierten Daten eine neue Patientendatei in DTX Studio™ Implant erstellt. Der Implantatbehandlungsplan wird in DTX Studio™ Implant erstellt und kann nach DTX Studio™ Clinic exportiert und darin direkt visualisiert werden.



Wichtig: Wenn die Ausrichtung des Dentalscans und des Patientenmodells in DTX Studio™ Clinic über SmartFusion™ erfolgt ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass Sie die Ausrichtung prüfen sollen:

Prüfen Sie die Ausrichtung des Dentalscans und des Patientenmodells. Wenn diese falsch ist oder Sie nicht sicher sind, berechnen Sie die Ausrichtung im Assistenten „Dentalscan bearbeiten“ neu.




Wenn DTX Studio™ Clinic und DTX Studio™ Implant auf einem einzigen Computer installiert sind, muss der genehmigte Plan exportiert werden.

1. Klicken Sie im Modul **Bestellen** auf **Anforderung ausfüllen** .
2. Wählen Sie den richtigen Plan aus der Liste aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Füllen Sie die angeforderten Informationen aus, um die Serviceanforderung anzupassen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Bericht sowie optional Anmerkungen oder Bilder anfügen.
4. Klicken Sie auf **Exportieren**.
5. Wählen Sie den Ort, an dem die exportierten Dateien gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.
6. Die Dateien sind jetzt am ausgewählten Ort verfügbar.

Arbeiten mit dem DTX Studio™ Implant Assistenten

Um den DTX Studio™ Implant Assistenten zu öffnen, klicken Sie oben rechts im Fenster auf **Assistent**.

Das Fenster **DTX Studio™ Implant Assistent** wird angezeigt. Der DTX Studio™ Implant Assistent enthält normalerweise verschiedene Registerkarten:

- **Aufgaben** : Mithilfe einer Übersicht über die Planungsaufgaben sowie zusätzliche Aufgaben werden Sie durch das Planungsvorgehen geleitet.
- **Warnungen** : Durch Warnmeldungen werden Sie über eventuelle Probleme informiert.
- **Planungsüberblick** : Hier wird ein Überblick über die Implantate, Abutments und/oder Verankerungsstifte im Behandlungsplan angezeigt. Außerdem wird angegeben, ob die Röntgenschablone und OP-Schablone erstellt wurden. Die Position der geplanten Implantate wird in der Zahnübersicht angezeigt.

Assistant


Warnings (4)


SUPERSEDED

DTX Studio™ Implant Warnsystem

Verschiedene technische/produktionsrelevante/prozedurale Warnungen (z. B. Führungshülsen zu eng beieinander, „keine Verankerungsstifte gesetzt“, Implantat zu nah am markierten Nerv geplant) sind in der DTX Studio™ Implant Software visualisiert.

Wenn Warnungen generiert werden, weil DTX Studio™ Implant klinische oder technische Probleme in der Planung erkannt hat, können diese im Bereich **Warnungen** des Planungsassistenten angezeigt werden.

Öffnen Sie den Planungsassistenten und klicken Sie auf **Warnungen** . Oder klicken Sie unter der Schaltfläche **Assistent** auf **Warnungen**. Nun werden die Warnungen im Planungsassistenten, unterteilt in klinische Warnungen und Warnungen für Schablonen, angezeigt.

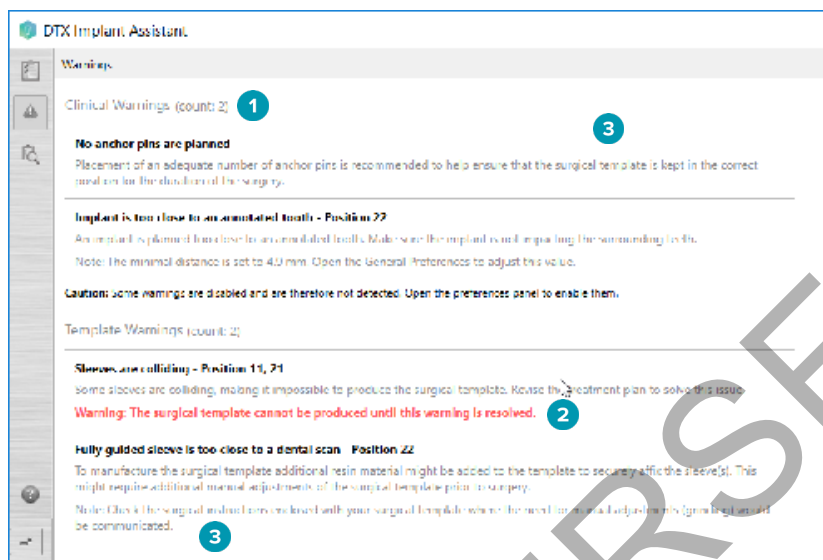

- 1 Die Anzahl aktueller klinischer Warnungen und Warnungen für Schablonen wird in der Überschrift des Warnungstyps angezeigt.
- 2 Wenn die OP-Schablone nicht erstellt werden kann, werden die spezifischen Warnungen mit einer roten Meldung gekennzeichnet, wonach die Warnungen gelöst werden müssen, bevor die OP-Schablone erstellt werden kann.
- 3 Bei konfigurierbaren Warnungen wird ein Hinweis mit dem Sollwert und wo dieser Wert geändert werden kann, sofern etwas angepasst werden muss, angezeigt. Wenn eine konfigurierbare Warnung in den Anwendereinstellungen deaktiviert wurde, wird ein Warnhinweis angezeigt, der Sie darüber informiert, dass einige Probleme möglicherweise nicht erkannt werden.

DTX STUDIO™ IMPLANT WARNUNGEN

Warnung



Das Planungsprogramm überprüft nicht automatisch alle technischen Einschränkungen. In einigen Fällen können OP-Schablonen möglicherweise auch dann nicht gefertigt werden, wenn durch die Software keine technischen Beschränkungen automatisch identifiziert werden.

Bei der Planung sind bestimmte technische Voraussetzungen zu berücksichtigen, um die korrekte Herstellung der OP-Schablone sowie den erfolgreichen Einsatz der gefertigten Schablone beim Eingriff sicherzustellen. DTX Studio™ Implant erkennt automatisch, ob möglicherweise gegen technische und klinische Voraussetzungen verstoßen wurde. Wenn gegen Beschränkungen verstoßen wurde, wird im Assistent eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf diese Meldung, um eine detaillierte Beschreibung zu den Hinweisen und Warnungen anzuzeigen.

Je nach Art des Verstoßes werden Objekte, die Probleme verursachen, in den 2-D- und 3-D-Ansichten rot oder orangefarben dargestellt. Die entsprechenden Warnmeldungen werden im Assistent angezeigt. Diese Meldungen sind auch im Fenster **Bestätigen**, in der Planungsübersicht, dem Bericht, etc. sichtbar.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die möglichen Warnungen je nach Warnungstyp.

Schablonenwarnungen

Im Bericht werden die Schablonenwarnungen auf der letzten Seite angezeigt.

Warnung	Beschreibung
Die Hülsen kollidieren.*	Einige Hülsen kollidieren, sodass es unmöglich ist, die OP-Schablone anzufertigen. Überprüfen Sie den Behandlungsplan, um das Problem zu beheben.
Ein Implantat und eine Hülse kollidieren.	Ein Implantat kollidiert mit einer Hülse. Dies kann während der OP zu Problemen führen. Eine Änderung des Behandlungsplans wird empfohlen.
Ein Verankerungsstift und eine Hülse kollidieren.	Ein Verankerungsstift kollidiert mit einer Hülse. Dies kann während der OP zu Problemen führen. Eine Änderung des Behandlungsplans wird empfohlen.
Der markierte Zahn und eine Hülse kollidieren.	Eine Hülse kollidiert mit einem markierten Zahn. Stellen Sie sicher, dass diese Kollision die korrekte Passung der OP-Schablone nicht verhindert.
Verankerungsstifthülse ist zu nah am Dentalscan geplant.	Die Hülse eines Verankerungsstifts ist zu nah am Dentalscan geplant. Dies kann während der OP zu Fehlern in der korrekten Platzierung der OP-Schablone führen. Versuchen Sie, die Hülse des Verankerungsstiftes so zu positionieren, dass sie mit dem Gipsabguss-Scans nicht kollidiert.
Pilothülse zu nah am Dentalscan positioniert.*	Eine Pilotbohrhülse ist zu nah am Gipsabguss-Scan positioniert, sodass es unmöglich ist, die OP-Schablone anzufertigen. Überprüfen Sie die Position des geplanten Implantates oder ändern Sie den Hülsenversatz, um das Problem zu beheben.
Eine vollständig geführte Hülse ist zu nah am Modellabguss.	Um die OP-Schablone anzufertigen, könnte im Produktionsverlauf zusätzlicher Kunststoff zur sicheren Anbringung der Hülse(n) auf die Schablone angebracht werden. Somit könnten zusätzliche manuelle Anpassungen der OP-Schablone vor der OP erforderlich sein. Hinweis: Überprüfen Sie die der OP-Schablone beigegefügte OP-Anleitung, in der der Bedarf an manuellen Anpassungen (Schleifen) beschrieben ist.

* Die OP-Schablone kann nicht angefertigt werden, bis dieses Problem behoben wurde.

Klinische Warnungen

Klinische Warnungen sind unterteilt in allgemeine Warnungen und Warnungen bezogen auf das Implantat. Klinische Warnungen werden auf den Implantatseiten des Berichts angezeigt.

Allgemeine Warnungen

Warnung	Beschreibung
Es wurden keine Verankerungsstifte geplant.	Es wird empfohlen, eine angemessene Anzahl von Verankerungsstiften einzusetzen, um die korrekte Position der OP-Schablone für die Dauer des Eingriffes zu gewährleisten.
Verankerungsstifte kollidieren.	Einige Verankerungsstifte kollidieren. Dies kann während der OP zu Problemen führen. Eine Änderung des Behandlungsplans wird empfohlen.
Die Röntgenschablone wurde nicht kalibriert.	Das 3-D-Modell der Röntgenschablone wurde mit einem Grauwert (Isowert) als Grenzwert erstellt, der für Ihren Scanner nicht kalibriert wurde. Um eine passgenaue OP-Schablone anzufertigen, ist es wichtig, das NobelGuide Kalibrierungsverfahren zu befolgen, welches im Handbuch zum NobelGuide Konzept beschrieben ist.
Behandlung mit nicht installierten Produkten geplant.*	Der Behandlungsplan umfasst Produkte, die auf Ihrem Computer derzeit nicht installiert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und öffnen Sie den Behandlungsplan erneut. Wenn die fehlenden Produkte nicht installiert werden können, wenden Sie sich bitte an das lokale Support-Team.
Darstellung geringer Qualität aktiviert.**	Für das 3-D-Patientenmodell wird im Behandlungsplan eine Darstellung geringer Qualität verwendet.
Die Ausrichtung des Gipsmodell-Scans wurde manuell angepasst.	Die Ausrichtung zwischen dem Patientenmodell und dem Gipsmodell-Scan wurde manuell angepasst, indem entsprechende Punkte markiert oder eine neue Zahnscanoberfläche importiert wurde. Stellen Sie sicher, dass der Gipsmodell-Scan mit dem (DVT)CT-Scan korrekt ausgerichtet ist, da Abweichungen zu Fehlern bei der korrekten Positionierung der Implantate führen können.
Die Ausrichtung mit SmartFusion ist fehlgeschlagen.*	Die Ausrichtung mit SmartFusion ist fehlgeschlagen und wurde nicht manuell angepasst. Starten Sie die Aktion „Dentalscan bearbeiten“, um das Problem zu beheben.
Überprüfen Sie die SmartFusion-Ausrichtung.	Prüfen Sie die Ausrichtung des Modellscans und des Patientenmodells. Wenn diese falsch ist oder Sie nicht sicher sind, berechnen Sie die Ausrichtung im Assistenten „Dentalscan bearbeiten“ neu.

* Die OP-Schablone kann nicht angefertigt werden, bis dieses Problem behoben wurde.

** Bei der Darstellung mit geringer Qualität besteht ein höheres Risiko, dass manche anatomischen Merkmale des Patientenmodells möglicherweise nicht sichtbar sind. Die Einstellung beeinflusst die Qualität des 3-D-Volumens. CT-Querschnitte sind nicht davon betroffen.

Implantatwarnungen

Einige der Implantatwarnungen sind konfigurierbar. Sie können zum Beispiel aktiviert oder deaktiviert werden. Außerdem können die Werte, die zum Auslösen der Warnungen führen, vom Anwender definiert werden. In der Tabelle unten sind sie als 'konfigurierbar' gekennzeichnet.



Wichtig

Die Werte zum Auslösen der klinischen Implantat-Warnungen müssen unter Berücksichtigung der klinischen Expertise und der Erfahrung des Anwenders präzise angepasst werden.


Warnung	Beschreibung
Die Implantate kollidieren.	Einige Implantate kollidieren. Dies kann während der OP zu Problemen führen. Eine Änderung des Behandlungsplans wird empfohlen.
Ein Implantat und ein Verankerungsstift kollidieren.	Ein Implantat kollidiert mit einem Verankerungsstift. Dies kann während der OP zu Problemen führen. Eine Änderung des Behandlungsplans wird empfohlen.
Ein Implantat ist zu nah an einem markierten Nerv.*	Ein Implantat ist zu nah an einem markierten Nerv geplant. Stellen Sie sicher, dass das Implantat den Nerv nicht beeinträchtigt. Hinweis: Der Mindestabstand zum markierten Nerv ist auf [...] mm eingestellt. Öffnen Sie die „Allgemeine Einstellungen“, um diesen Wert anzupassen.
Ein Implantat ist zu nah an einem markierten Zahn.*	Ein Implantat ist zu nah an einem markierten Zahn geplant. Stellen Sie sicher, dass das Implantat die benachbarten Zähne nicht beeinträchtigt. Hinweis: Der Mindestabstand zum markierten Nerv ist auf [...] mm eingestellt. Öffnen Sie die „Allgemeine Einstellungen“, um diesen Wert anzupassen.

* Diese Warnungen sind konfigurierbar

Konfigurierbare Warnungen

Die konfigurierbaren Warnungen basieren auf einem das Implantat umgebenden Volumen, das auch als Warnvolumen bezeichnet wird. Wenn dieses Volumen mit einer markierten anatomischen Struktur kollidiert, wird die Warnung ausgelöst.

Die Definition des Warnvolumens basiert auf einem vordefinierten Abstand. Standardmäßig ist für diesen Abstand ein Mindestwert von 1,5mm eingestellt. Bei diesem Mindestabstand stimmt das Warnvolumen mit der gelben Zone (diese repräsentiert einen Umkreis mit einem Abstand von 1,5mm zum Implantat und 2 x 1,5mm (3,0mm) Abstand an der Spitze) überein. Das Warnvolumen kann vergrößert werden. Wie im Bild (für einen Abstand von z. B. 4,0mm) zu sehen, wird das Warnvolumen entsprechend skaliert.

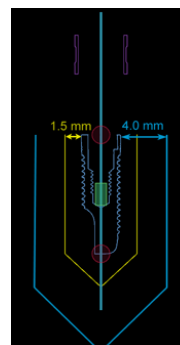

Warnung zwischen Implantaten und Nerven

Wenn ein Implantat zu nahe an einem markierten Nerv platziert wird (das Warnvolumen also mit der Darstellung des markierten Nervs kollidiert) wird eine Warnung ausgelöst. Das betroffene Implantat wird orangefarben angezeigt (wenn es noch nicht sichtbar war).

Warnung zwischen Implantaten und Zahnwurzeln

Wenn ein Implantat zu nahe an einer Zahnwurzel platziert wird (das Warnvolumen also mit dem markierten Zahn kollidiert) wird eine Warnung ausgegeben. Das Implantat wird angezeigt und orange gefärbt.


Hinweis: Der Mindestabstand für das Warnvolumen muss unter **DTX Studio Implant > Allgemeine Einstellungen** eingestellt werden. Die Werte werden auf dem Computer, auf dem Sie arbeiten, gespeichert. Wenn Sie den Behandlungsplan auf einem anderen Computer als dem, mit dem Sie den Behandlungsplan erstellt haben, öffnen, werden die Warnungen entsprechend den Einstellungen des Computers, auf dem der Plan gerade verwendet wird, angezeigt. Dies kann je nach Einstellungen des Computers zu unterschiedlichen Warnungen führen. Die konfigurierbaren Werte können kontrolliert und in den Einstellungen angepasst werden, und die Werte werden in der Übersicht über die Warnungen gezeigt, wenn eine Warnung ausgegeben wird.

TECHNISCHE EINSCHRÄNKUNGEN

Es wird eine Reihe von technischen Einschränkungen erklärt, die für die richtige Erstellung der OP-Schablone von entscheidender Bedeutung sind. Wenn diese Einschränkungen nicht berücksichtigt werden, kann nicht garantiert werden, dass die OP-Schablone gefertigt bzw. korrekt verwendet werden kann.

Mindestabstand zwischen den Führungshülsen

Für die OP-Schablone muss ein Mindestabstand zwischen den Führungshülsen eingehalten werden. Bei zu geringem Abstand kann die OP-Schablone nicht angefertigt werden.

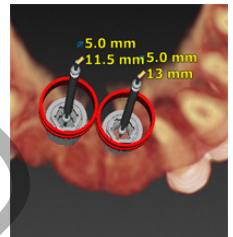


Wenn der Mindestabstand zwischen den Führungshülsen nicht eingehalten wird, werden die Führungshülsen automatisch in rot angezeigt. In dieser Konfiguration kann die OP-Schablone nicht angefertigt werden.

Um dieses Problem zu beheben, sind die Implantate so zu verschieben oder zu kippen, dass mehr Abstand zwischen den Führungshülsen besteht. Wenn der Abstand groß genug ist, werden die Führungshülsen wieder in der ursprünglichen Farbe angezeigt.

Vorgeschriebener Mindestabstand von Implantaten/Führungshülsen und Verankerungstiften

Wenn Führungshülsen und Implantate oder Verankerungstifte sehr nahe zueinander positioniert sind oder kollidieren, werden sie automatisch orange dargestellt. Ist der Abstand zwischen Hülse und Implantat bzw. Ankerstift zu kurz, kann es während des Eingriffs schwierig sein, eine Osteotomie vorzubereiten oder ein Implantat oder einen Ankerstift einzusetzen.


Um dieses Problem zu beheben, müssen die Implantate oder Verankerungstifte so verschoben oder gekippt werden, dass mehr Abstand zwischen ihnen und den Führungshülsen besteht. Wenn der Abstand groß genug ist, werden sie wieder mit der normalen Farbe angezeigt.

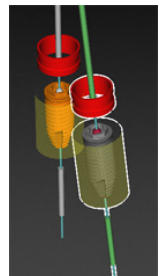

Kollision zwischen Implantaten, Verankerungstiften oder Implantaten und Verankerungstiften

Wenn die Implantate, Verankerungstifte oder Implantate und Verankerungstifte kollidieren, werden sie automatisch orange dargestellt. Eine Kollision dieser Objekte könnte beim Eingriff zu Komplikationen führen.

Um dieses Problem zu beheben, die Implantate oder Verankerungstifte so verschieben oder kippen, dass sie nicht kollidieren. Wenn der Abstand groß genug ist, werden sie wieder mit der normalen Farbe angezeigt.

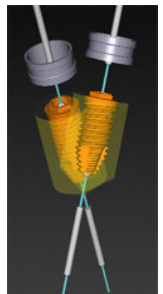

Hinweis: In einigen Fällen wird das Implantatbett zuerst für einen Verankerungstift verwendet. Der Verankerungstift muss vor dem Einsetzen des Implantats entfernt werden.

Verhältnis zwischen Führungshülse und Röntgenschablone und/oder Dentalscan


Bei der Planung müssen neben allen klinischen Überlegungen die technischen Beschränkungen hinsichtlich der Position der Führungshülsen in Bezug zur Röntgenschablone und/oder dem Dentalscan berücksichtigt werden: Die Position der Führungshülsen muss anhand der gezeigten Röntgenschablone und/oder des gezeigten Dentalscan überprüft werden.

Röntgenschablone

Position

Jede Führungshülse muss innerhalb der Röntgenschablone positioniert werden, um sicherzustellen, dass für den Halt der Führungshülse ausreichend Material in der OP-Schablone vorhanden ist.


- 1 Richtig positioniert
- 2 Falsch positioniert: Die Hülse ist zu weit entfernt und nicht mit der Röntgenschablone verbunden.

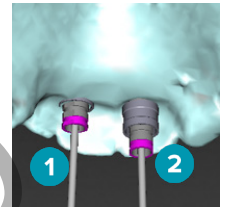

Tiefe

Es ist sehr wichtig, die Tiefe der Hülse in Bezug zur Röntgenschablone zu prüfen. Die Hülse darf nicht in die gingivaseitige Oberfläche (Tiefdruck-Oberfläche) eindringen, damit eine korrekte Position der OP-Schablone sichergestellt ist. Überprüfen Sie die Tiefe der Hülse durch Anzeige ihrer Position und Feineinstellung der Implantattiefe mithilfe des Symbols **Tiefe** in der entsprechenden Symbolleiste. Alternativ, wenn Sie eine Pilotheile gewählt haben, ziehen Sie die Anpassung des Hülsenversatzes in Betracht.

- 1 Richtig positioniert
- 2 Falsch positioniert: Führungshülse zu tief platziert.

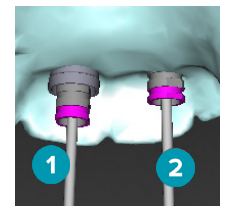




Scan des Gipsmodells

Überprüfen Sie die Hülsenpositionen nach der Implantatplanung. Folgende Probleme müssen behoben werden:

Seitliche Kollisionen

Seitliche Kollisionen sind Kollisionen mit Nachbarzähnen oder potentiell mit Weichgewebe (Oberflächenscan der intraoralen Situation). Wenn eine Kollision auftritt, prüfen Sie, ob die Position des Implantats so verändert werden kann, dass es zu keiner Kollisionswarnung kommt. Wenn dies nicht möglich ist, probieren Sie, den Hüsendurchmesser zu verringern oder die Option zu wählen, bei der nur die Pilotbohrung erfolgt. Erfahrene Anwender können auch erwägen, Teile der geführten Vorgehensweise beim Bohren zu überspringen und das Bohrprotokoll nach dem Entfernen der OP-Schablone mit dem Freihandprotokoll zu beenden. Danach erfolgt die Freihand-Implantatinserterion.



- 1 Falsch positioniert: zu nah an Nachbarzähnen oder Weichgewebe oder Kollision damit.
- 2 Richtig positioniert: geänderter Durchmesser.
- 3 Richtig positioniert: geändert in Pilotheile.

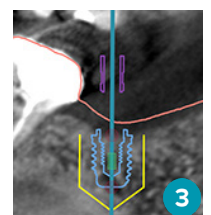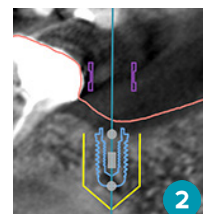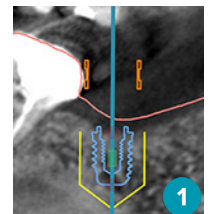

Vertikale Kollisionen

Vertikale Kollisionen sind potentielle Kollisionen mit Weichgewebe (Oberflächenscan der intra-oralen Situation). Wenn es zu einer vertikalen Kollision kommt und Sie die Pilotbohrroption gewählt haben, ziehen Sie die Anpassung des Hülsenversatzes in Betracht.

- 1 Falsch positioniert
- 2 Richtig positioniert: Hülsenversatz angepasst.

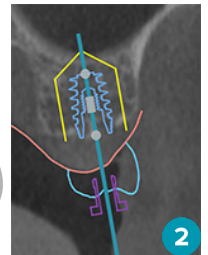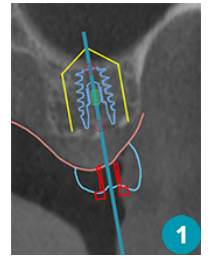

Verhältnis zwischen Führungshülse und Knochen

Bei der Planung müssen die technischen Einschränkungen für die Position der Führungshülsen in Relation zur Knochenoberfläche (ggf. mit Zähnen) berücksichtigt werden. Wenn die Führungshülse mit der Knochenoberfläche oder mit den Restzähnen im Knochenmodell kollidiert, kann die OP-Schablone beim Eingriff möglicherweise nicht korrekt positioniert werden.

In bestimmten Fällen ist der Fehler ggf. akzeptabel (z. B., wenn die Führungshülse beispielsweise mit einem Zahn kollidiert, der vor dem Eingriff extrahiert wird, oder wenn es sich um eine Kollision mit einem Artefakt handelt).

Guided Abutments

Bei geplanter Verwendung von Guided Abutments ist darauf zu achten, dass der Winkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 30° beträgt.

Die Röntgenschablone wurde ohne kalibrierten Isowert erstellt.

Es wird empfohlen, bei der Erstellung einer Röntgenschablone den kalibrierten Isowert zu verwenden, wenn eine OP-Schablone an die Produktionsabteilung exportiert wird. Wenn das Kalibrierungsset nicht verwendet wird, wird durch eine Kalibrierungswarnung („Das Röntgenschablonenmodell wurde ohne einen kalibrierten Isowert erstellt“) auf diesen wichtigen automatisierten Schritt hingewiesen.


Diskutieren des Behandlungsplans

Mit dem Modul **Diskutieren** können Sie Berichte erstellen, schreibgeschützte Viewer-Dateien und Communicator-Präsentationen erstellen.

BERICHTE

Erstellen eines Berichts

So erstellen Sie einen Bericht:

1. Stellen Sie sicher, dass eine Patientendatei geöffnet ist. Klicken Sie in der Gruppe **Kommunizieren** auf der Registerkarte **Fertigstellen** des Planungsmoduls auf **Bericht** .
2. Daraufhin wird die Liste mit den Planungsdateien angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Planungsdatei aus und klicken Sie auf **Weiter**. Das System lädt die Daten und erstellt die Berichtseiten.
3. Es werden Bildvorschauen der Berichtseiten angezeigt: Diese enthalten eine Übersicht über die verfügbaren allgemeinen Informationen über den Patienten, die Behandlung, den verwendeten Scanner, die Warnungen zu Planungen und verwendete Produkte sowie bildliche Darstellungen der chirurgischen Planung usw.

Hinweis: Die Bildvorschauen werden mit einer geringeren Auflösung als die tatsächliche PDF-Datei erstellt.

4. Geben Sie dem Bericht einen geeigneten Namen.
5. Optional können Sie dem Bericht auch eine Notiz (bis zu 700 Zeichen) hinzufügen.
6. Passen Sie den Bericht an, indem Sie die entsprechenden Seiten auswählen: Heben Sie die Auswahl für die Seiten auf, die nicht in dem Bericht enthalten sein sollen. Die abgewählten Seiten werden in Grau angezeigt und werden nicht in dem endgültigen Bericht enthalten sein.
7. Gegebenenfalls können Sie den Bericht anonymisieren.
8. Klicken Sie auf **Fertig**, um den Bericht zu erstellen, oder auf **Abbrechen**, um den Vorgang abubrechen.
9. Nach Bestätigung wird eine Vorschau der für den Bericht ausgewählten Seiten angezeigt. Blättern Sie durch die Seiten, um ihren Inhalt zu überprüfen.

Drucken eines Berichts

Zum Drucken eines erstellten Berichts exportieren Sie den Bericht und speichern ihn als PDF-Datei.

1. Wählen Sie in der Liste **Kommunikations-Elemente** einen Bericht aus.
2. Klicken Sie in der Gruppe **Bericht** auf der Registerkarte **Kommunikation** der Symbolleiste auf **Exportieren**.
3. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie den Bericht speichern möchten.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Der Bericht wird als PDF-Dokument gespeichert. Der Bericht wird standardmäßig geöffnet, sodass Sie das Dokument drucken können.

VIEWER-DATEIEN

Wenn DTX Studio™ Implant nicht auf dem Computer der Person verfügbar ist, mit der Sie den Behandlungsplan besprechen möchten, kann eine Viewer-Datei verwendet werden, um den Behandlungsplan darzustellen. Eine Viewer-Datei stellt eine Version des Behandlungsplans dar, der in DTX Studio™ Implant als schreibgeschützte Datei gespeichert wird und den Behandlungsplan für einen bestimmten Patienten enthält. Eine Viewer-Datei kann geöffnet werden, vorausgesetzt DTX Studio™ Implant Viewer ist auf dem verwendeten Computer installiert.

Erstellen einer Viewer-Datei

So erstellen Sie Viewer-Dateien:

1. Gehen Sie zum Modul **Diskutieren**.
2. Klicken Sie auf **Viewer**  in der Gruppe **Kommunizieren** der Registerkarte **Kommunikation**.
3. Wählen Sie die Planungsdatei aus der Liste aus.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Tragen Sie die Details auf der Anpassungsseite ein:
 - Geben Sie einen geeigneten Namen für die Viewer-Datei ein.
 - Klicken Sie auf die Bilder, die der Viewer-Datei hinzugefügt werden sollen.
 - Geben Sie an, ob die CT-Bilddaten komprimiert werden sollen oder nicht.
 - Wenn die Patienteninformationen nicht freigegeben werden sollen, anonymisieren Sie die Datei, indem Sie die Option **Anonymisieren aller Patienteninformationen** auswählen.
 - Um die Viewer-Datei unmittelbar nach ihrer Fertigstellung freizugeben, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie auf **Fertig**, um die Viewer-Datei zu speichern.
7. Die Viewer-Datei wird gespeichert und in der Liste **Kommunikations-Elemente** angezeigt. Das Dialogfeld **Viewer freigeben** wird angezeigt.
8. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein oder verwenden Sie die Schaltfläche **Kontakte**, um die Personen auszuwählen, mit denen der Viewer geteilt werden soll.
9. Fügen Sie eine persönliche Nachricht hinzu und klicken Sie auf **Freigeben**.
10. An die ausgewählten Personen wird eine E-Mail mit einem Download-Link gesendet.

Öffnen von Viewer-Dateien mit DTX Studio™ Implant

1. Doppelklicken Sie in der Liste **Kommunikations-Elemente** auf eine Viewer-Datei, um diese auszuwählen.
2. Daraufhin wird die DTX Studio™ Implant Viewer-Anwendung geöffnet und die ausgewählte Viewer-Datei angezeigt.

Öffnen von Viewer-Dateien über den Download-Link

Wenn Sie eine E-Mail mit einem Download-Link für eine Viewer-Datei erhalten haben:


1. Klicken Sie auf den Download-Link der E-Mail.
2. Die Viewer-Datei wird heruntergeladen.
3. Navigieren Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Datei und doppelklicken Sie auf die gespeicherte Viewer-Datei.
4. Die Viewer-Datei wird im DTX Studio™ Implant Viewer geöffnet.

COMMUNICATOR-PRÄSENTATIONEN

Communicator-Präsentationen enthalten eine Übersicht des Behandlungsplans. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Markierungen hinzuzufügen, während Sie mit dem Patienten über das Verfahren sprechen. Communicator-Präsentationen können verwendet werden, um Patienten und Kollegen eine zahnmedizinische Behandlung anschaulich darzustellen. Darüber hinaus können die Präsentationen über den Cloud-Service zur Verfügung gestellt werden. Communicator-Präsentationen werden in die Cloud geladen und können über die Communicator iPad® App abgerufen werden.

Erstellen einer Communicator-Präsentation

So erstellen Sie eine Communicator-Präsentation:


1. Gehen Sie zum Modul **Diskutieren**.
2. Klicken Sie auf **Communicator**  in der Gruppe **Kommunizieren** der Registerkarte **Kommunikation**.
3. Wählen Sie die Planungsdatei aus der Liste aus.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Tragen Sie die Details der Communicator-Präsentation auf der Anpassungsseite ein:
 - Geben Sie einen geeigneten Namen für die Präsentation ein.
 - Optional können Sie Notizen über die Präsentation hinzufügen. Diese Notizen werden in der Communicator-Präsentation angezeigt, wenn diese auf einem iPad® angezeigt wird.
 - Legen Sie fest, welche Bilder der Präsentation hinzugefügt werden sollen. Hierfür stehen nur die Bilder der Patientenbibliothek zur Verfügung.
 - Wenn die Patienteninformationen nicht freigegeben werden sollen, anonymisieren Sie die Datei, indem Sie die Option **Anonymisieren aller Patienteninformationen** auswählen.
 - Um die fertige Communicator-Präsentation auf den iPad® hochzuladen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie auf **Fertig**.
7. Die Communicator-Präsentation wird gespeichert und in der Liste **Kommunikations-Elemente** angezeigt.

Exportieren eines Behandlungsplans zum Einsehen oder für den Eingriff

DTX Studio™ Implant ermöglicht Ihnen, den Behandlungsplan zu exportieren, um ihn zum Beispiel in DTX Studio™ Clinic, X-Guide™ oder OsseoCare™ Pro zu verwenden oder in anderen Softwareprodukten aufzurufen.


EXPORTIEREN NACH DTX STUDIO™ CLINIC

So exportieren Sie den Behandlungsplan zur Darstellung in DTX Studio™ Clinic:

1. Gehen Sie zum Modul **Planung**.
2. Klicken Sie auf **Für Clinic exportieren**  in der Gruppe **OP-Plan** auf der Registerkarte **Fertig stellen**.
3. Wählen Sie den Ordner zum Speichern der verschlüsselten DTXIP-Datei aus, die alle erforderlichen Informationen Ihres Behandlungsplans enthält.
4. Es wird eine Meldung angezeigt, die das erfolgreiche Speichern sowie den Speicherort der Datei bestätigt. Klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu schließen.

ÖFFNEN DES EXPORTS

So exportieren Sie den Behandlungsplan zur Darstellung in andere Softwareprodukte:

1. Gehen Sie zum Modul **Planung**.
2. Klicken Sie auf **Export öffnen**  in der Gruppe **Kommunizieren** auf der Registerkarte **Fertig stellen**.
3. Wählen Sie den Ordner aus, in dem der Behandlungsplan gespeichert werden soll.
4. Klicken Sie auf **Exportieren**.
5. Es wird eine Meldung angezeigt, die das erfolgreiche Speichern sowie den Speicherort der Datei bestätigt. Klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu schließen.

X-GUIDE™ OP-PLAN

X-Guide™ ist ein 3-D-Zahnimplantat-Navigationssystem, das Sie bei der Übertragung des Behandlungsplans auf den Patienten unterstützt und Ihnen während des Eingriffs interaktive Anweisungen gibt.




Warnung

Bitte beachten Sie, dass die Darstellung von Daten (z. B. Ansichtsdarstellung, Objektfarben) sowie Warnhinweise in der DTX Studio™ Implant und X-Guide™ Software unterschiedlich sein können.

Erstellen eines X-Guide™ OP-Plans

So erstellen Sie einen X-Guide™ OP-Plan:

6. Klicken Sie im Modul **Diskutieren** auf **X-Guide**  in der Gruppe **Kommunizieren**.
7. Wählen Sie in der Liste die gewünschte bestätigte Planungsdatei aus.
8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Tragen Sie die Details auf der Seite **Chirurgieeinstellungen anpassen** ein: Falls erforderlich, führen Sie eine Anonymisierung durch.
10. Klicken Sie auf **Fertig**.

Exportieren eines X-Guide™ OP-Plans

So exportieren Sie einen X-Guide™ OP-Plan:

1. Wählen Sie im Modul **Diskutieren** einen erstellten **X-Guide™** OP-Plan in der Liste **Kommunikations-Elemente** aus.
2. Klicken Sie auf **Exportieren**  in der Gruppe **X-Guide** auf der Registerkarte **Kommunikation**.



Warnung

DTX Studio™ Implant unterstützt nur eine Auswahl an Implantaten, die nach X-Guide™ exportiert werden sollen. Nicht unterstützte Implantate werden nicht in die X-Guide™ Datei aufgenommen.

3. Klicken Sie im Dialogfeld auf **Durchsuchen** und wählen Sie den Speicherort aus, an dem die X-Guide™ OP-Datei gespeichert werden soll.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.


OSSEOCARE™ PRO OP-PLAN

OsseoCare™ Pro ist eine Chirurgieeinheit, die über das iPad® von Apple betrieben wird und mit der vor einem chirurgischen Eingriff die Behandlungssequenz geplant und eingerichtet werden kann. Die Anwendung wurde für Zahnärzte und Chirurgen entwickelt, um Knochen und Weichgewebe mit geeigneten Instrumenten zu schneiden.

Ein OsseoCare™ Pro OP-Plan kombiniert die aufeinanderfolgenden Schritte der Behandlungssequenz und führt den Zahnarzt oder Chirurgen Schritt für Schritt durch den Eingriff – unter Verwendung der iPad® App.

Erstellen eines OsseoCare™ Pro OP-Plans

So erstellen Sie einen OsseoCare™ Pro OP-Plan:

1. Klicken Sie im Modul **Diskutieren** auf **OsseoCare Pro**  in der Gruppe **Kommunizieren**.
2. Wählen Sie in der Liste die gewünschte bestätigte Planungsdatei aus.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Tragen Sie die Details auf der Seite **Chirurgieeinstellungen anpassen** ein:
5. Klicken Sie auf **Fertig**. Der erstellte OP-Plan wird standardmäßig in die Cloud hochgeladen.
6. Klicken Sie auf **Ich stimme zu**, um mit dem Haftungsausschluss fortzufahren.

Scannerkalibrierung

Hinweis: Dieses Scanner-Kalibrierungsverfahren wird nur zur Erstellung einer Röntgenschablone benötigt.


Um den Behandlungsplan in der OP richtig und exakt beim Patienten umzusetzen, bedarf es einer äußerst präzisen OP-Schablone, die wie die Röntgenschablone genau auf das umgebende Weichgewebe und den Knochen passen muss. Dazu muss eine exakte 1:1-Kopie durch Digitalisierung per (DVT)CT-Scanner sowie durch Erstellung eines virtuellen Modells der Röntgenschablone in der Software unter Verwendung der für den Scanner geeigneten Einstellungen erstellt werden. Dieser Wert, der auch als „Isowert“ bezeichnet wird, kann entweder mit einem manuellen Verfahren oder automatisch ermittelt werden. Bei der automatischen Ermittlung führt der Scanner einen Kalibrierungsscan auf der Grundlage des leistungsstarken NobelGuide® Kalibrierungsobjekts mit den geeigneten Einstellungen durch. Das NobelGuide® Kalibrierungsobjekt hat die gleichen röntgentransparenten Eigenschaften wie die Röntgenschablone (PMMA) und eine genau definierte, der Software bekannten Form. DTX Studio™ Implant ermittelt durch automatische Untersuchung des Referenzscans (Kalibrierungsscans) und anschließenden Vergleich des Referenzscans mit der ursprünglichen Form eigenständig den optimalen Isowert (**kalibrierter Isowert**) und wendet diesen dann an, um die richtigen Abmessungen und die korrekte Form aus dem Röntgenschablonen-CT zu extrahieren (segmentieren). Die Software speichert alle Scanner-spezifischen Kalibrierungssets. Für jedes Röntgenschablonen-CT durchsucht sie automatisch die „bekannten“ Scanner nach einem geeigneten Kalibrierungsset. Wird ein geeigneter Scanner erkannt, wird der entsprechende **kalibrierte Isowert** automatisch vorgeschlagen und angewendet. Der Isowert-Editor im Röntgenschablonen-Assistenten liefert Daten zum verwendeten Kalibrierungsset, zum verwendeten Scanner und zum kalibrierten Isowert.

Es wird empfohlen, bei der Erstellung einer Röntgenschablone den kalibrierten Isowert zu verwenden, wenn eine OP-Schablone an die Produktionsabteilung exportiert wird. Wenn das Kalibrierungsset nicht verwendet wird, wird durch eine Kalibrierungswarnung (**Das Röntgenschablonenmodell wurde ohne einen kalibrierten Isowert erstellt**) auf diesen wichtigen automatisierten Schritt hingewiesen.

Bei Verwendung der Kalibrierung wird im Isowert-Editor anstelle von **Isowert** die Option **Kalibrierter Isowert** angezeigt. Bei Verwendung eines vom System erzeugten Kalibrierungssets wird **Empfohlener Isowert** angezeigt.

ERSTELLEN EINES NEUEN KALIBRIERUNGSSETS

Wenn zum ersten Mal Bilddaten eines spezifischen (DVT)CT-Scanners und ein spezifisches Scanprotokoll verwendet werden, muss ein neues Kalibrierungsset angelegt werden. Wenn dieses Kalibrierungsset erstellt wurde, kann es für alle Patienten verwendet werden, die mit dieser Bildgebungseinheit gescannt werden. Es wird empfohlen, mindestens alle sechs Monate bzw. wenn eine Aktualisierung oder ein Upgrade der Bildgebungseinheit (Scanner) oder eine Wartungsmaßnahme durchgeführt wurde, ein neues Kalibrierungsset anzulegen.

Um ein neues **Kalibrierungsset** anzulegen, klicken Sie im Modul **My Office** auf der Registerkarte **Scanner** in der Gruppe Kalibrierung auf **Neu** . Der Assistent **Kalibrierung erstellen** wird gestartet.

Der Kalibrierungsassistent leitet Sie in drei Schritten durch das Kalibrierungsverfahren:

1. DICOM-Dateien für die Kalibrierung laden
2. Kalibrierungseinstellungen berechnen
3. Einzelheiten des Kalibrierungssets eintragen und Set speichern

Symbolglossar



Chargen-Code



Katalognummer



Achtung



Gebrauchsanweisung beachten



Enthält oder Vorhandensein
von Phthalaten



Herstellungsdatum



Nicht erneut sterilisieren



Nicht wiederverwenden



Nicht verwenden, wenn die
Verpackung beschädigt ist

Rx Only

Nur zur Verschreibung

ID

Patienten-ID



Vor Sonnenlicht geschützt
aufbewahren



Trocken lagern



Hersteller



Medizinprodukt



Bedingt MRT-tauglich



Nicht steril



Patientennummer



Seriennummer



Durch Bestrahlung sterilisiert



Verwendbar bis

Index

Symbole

1G	24
2D	18, 20
3D	20
3-D-Schnitt	17

A

Abutment	33, 34, 36, 55
Winkel	33
Alt	18
Anmelden	14
Zwei-Faktor-Authentifizierung	14
Ansicht	
Kaudal-kranial	18
Kranio-kaudal	18
Links	18
Rechts	18
Standard	18
Von oben nach unten	18
Von unten nach oben	18
Vorne	18
Antagonist	29
Anwender	15
Neu	15
Arbeitsbereich	17
Art des Eingriffs	36
Auf Implantat einrasten lassen	41
Ausrichtung	26

B

Befehl	18
Behandlung	12
Behandlungsplan	
Exportieren	59
Bericht	
Erstellen	56
Bestätigen	43
Bestellung	44
Dentalscan	45
Produkt	44
TempShell	45

C

CT-Bild	20
Ctrl	18
CT-Schicht	20

D

Dentalscan	24, 28, 31, 54
Hinzufügen	25

Diagnose	31
DICOM	21

E

Ebene	
Knochenschnitt	37
Einrasten	41
Exportieren	
Nach DTX Studio™ Clinic	59
Nach OsseoCare Pro	60
Nach X-Guide™	59
Öffnen	59

F

Für Clinic exportieren	59
------------------------------	----

G

Gesichtsscan	29
Hinzufügen	29
Trimmen	29

H

Hounsfield-Einheit	33
HU	33

I

Implantat	33, 35
Ausrichtung ändern	35
Implantatmodus	41
Schulterpunkt	34
Spitze	34
Verschieben	35
Winkel	33
Initialisierungsposition	27
Interaktionsmodus	18
Intraoral	38
Isolieren	22

K

Kalibrierung	61
Kaudal-kranial	18
Knochenartefakte löschen	23
Knochenschnittebene	37
Kollision	53
Vertikal	55
Kompatibilität	9
Kontextabhängige Registerkarte	17
Konto	14, 15
Account wechseln	14
Kontoverwaltung	15
Kontoverwaltung	15

Kontrollpunkte	21	Patientendatei	13
Konturlinie	19	Schließen	13
Korrespondierende Punkte		Patientenmaske	22
Punkte für SmartFusion™ entfernen	28	Ausschneiden	22
Quadrant	27	Deaktivieren	23
Verteilung	27	Größten Teil erhalten	23
Kranio-kaudal	18	Hinzufügen	22
Kreisförmige Bereiche	35	Isolieren	22
Kurvenmodus	41	Zurücksetzen	23
L		Patientenmodell	19
LabDesign	46	Planungsszenario	12
Level/Window	20	Verwalten	12
2-D	20	Position	54
3-D	20	Praxislizenzversion	15
M		Produkt	
Magischer Radierer	23	Auswählen	34
Messen		Produktauswahl	36
Abstand	33	Produkt auswählen	34
Grauwert	33	Produktbestellung	44
HU	33	Q	
Winkel	33	Quadranten	27
Messungen	33	Querschnittskurven	21
Mindestabstand	53	R	
Modellscan-Bestellungen	45	Radierer	23
Modus		Magic	23
Interaktion	18	Registerkarte	18
Rotation	18	Zugehörige Registerkarte	17
Schwenken	18	Röntgenschablone	39, 54
Zoombereich	18	Position	54
Zoomen	18	Tiefe	54
Mukosa	38	Rotationsmodus	18
Mundvorhof	38	S	
O		Scanner	56, 61
Öffnen	17	Scan-Warnungen	10
Öffnen des Exports	59	Schablonenwarnungen	50
OP-Plan		Schwenkmodus	18
OsseoCare Pro	60	Seitliche Kollisionen	54
X-Guide	59	Serviceanforderung	47
OP-Schablone		Antwort	47
Erstellen	42	Ausfüllen	47
Überprüfen	42	SmartFusion™	27
OsseoCare Pro		Initialisierungsassistent	26
Erstellen	60	Warnungen	28
P		SmartSetup™	29
Passwort	14	Einstellungen	29
Patient		Snap-Funktion	
Bearbeiten	23	Springen	41
		Wiederherstellen	41

Spitze.....	34
Springen zu einem anderen Implantat	41
Steg mit Snap-System.....	41
Symbolleiste	16, 17, 19, 49

T

Technische Einschränkungen	53
TempShell	45
Toleranz	35
Gelbe Zone	35

U

Übertragungsfunktion	22
Galerie	22
Umriss	19
Umschalttaste	18

V

Verankerungsstift.....	38, 39, 40
Verbindungen	44
Annehmen	44
Hinzufügen.....	44
Vertikale Kollisionen.....	55
Verwalten.....	12
Virtuelle Zahnaufstellung	29
Visibility Editor	19
Volumen der Patientenmaske abschneiden	22
Volumen zur Patientenmaske hinzufügen	22
Voxel	22

W

Warnung.....	48, 49
Konfigurierbar.....	52
Schablonenwarnung	50

X

X-Guide™	59
Erstellen	59
Exportieren.....	59

Z

Zahn entfernen	32
Zahnlos	24, 38
Teilbezahnt	24
Zahnnotationssystem	21
Zahnposition	34, 35
Zahnübersicht.....	35
Zoombereichsmodus.....	18
Zoommodus	18
Zwei-Faktor-Authentifizierung	14